

ЭНДОДЕЗ® - "КРОНТ"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭНДСКОПОВ



Сделано в России

Подходит для обработки всех типов гибких эндоскопов
(гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, цистоскоп и пр.)

Тел.: +7 (495) 500 48 84 (многоканальный)

Интернет: www.kront.com

ЭНДОДЕЗ®-“КРОНТ”

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭНДСКОПОВ



Устройство ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией) или предстерилизационной очистки и дезинфекции высокого уровня.

ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» позволяет заменить повторяющееся и трудоемкое ручное шприцевание каналов эндоскопа прокачкой жидкостей с постоянной скоростью и давлением в течение заданного времени.

Устройство повышает качество обработки и снижает риск повреждения эндоскопов.

Наличие встроенного электронного термометра позволяет проводить очистку и дезинфекцию в контролируемом температурном режиме.

Устройство оснащено двухступенчатым фильтром, состоящим из сетчатого фильтра предварительной и тонкой очистки и предотвращающим засорение каналов эндоскопа от белковых остатков, солей жесткости воды и не растворившихся дезинфицирующих средств.

По безопасности устройство соответствует требованиям ГОСТ IEC 61010-1 и выполнено по классу защиты II.

Основные преимущества

- Снижение утомляемости персонала за счет автоматизации процесса обработки.
- Обработка всех каналов эндоскопа одновременно.
- Предотвращение риска повреждения каналов.
- Фильтрация жидкости с целью исключения засорения каналов эндоскопа.
- Автоматический контроль времени этапа обработки.
- Контроль температуры жидкости.
- Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства - IP 22 по ГОСТ 14254.
- Не требует заземления.

Технические характеристики

- Производительность - 1,0 л/мин
- Время промывки - от 0 до 99 минут
- Класс защиты - IP22
- Электропитание - 220В / 50 Гц
- Рабочее напряжение - 12 В
- Потребляемая мощность не более 9 Вт
- Класс электробезопасности II
- Предохранительные клапана от повреждения каналов при повышенном давлении в случае засорения:
 - 30±10 кПа (0,3±0,1 атм)
 - 50±10 кПа (0,5±0,1 атм)
- Диапазон измерения температуры прокачиваемой жидкости: +10 ÷ +70 °С
- Габаритные размеры (Д x Ш x В): 160x185x212 мм
- Вес не более - 1,5 кг.



Регистрационное удостоверение № P3H 2017/6173.

Тел.: +7 (495) 500 48 84 (многоканальный)

Интернет: www.kront.com