

Серия облучателей открытого типа
со счетчиком наработки часов
и электронным пуском уф-ламп



ОБН-150-С-"КРОНТ"

- Счетчик наработки часов, для фиксации отработанного бактерицидными лампами времени.
- Использование электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) для «мягкого» пуска бактерицидных ламп.
- Значительная экономия потребляемой электроэнергии.
- Современный дизайн.
- Качество проверенное временем.

Модель	ОБН-150-С (2x30)
Производительность при бактерицидной эффективности:	120 м ³ /ч : 99,9%
	185 м ³ /ч : 99%
	280 м ³ /ч : 95%



ЗАПАТЕНТОВАНО
В РОССИИ

Консультации по подбору оборудования, а также по вопросам подготовки технических заданий при организации тендеров с 09:00 до 17:00 МСК
тел. (495) 500-48-84 (многоканальный), Email: info@kront.com, Интернет: www.kront.com или kront.ru
АО "КРОНТ-М" Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, дом 9



6

6

6

9

6

6

8CL@8 8

9

6

6

6

8CL@8 8

9

8CL@8 8 F H@8			
Бактерицидная эффективность, %	99,9	99,0	95,0
Производительность (объем), м ³ /ч	120 ¹	185 ¹	280 ¹
	110 ²	170 ²	260 ²
	100 ³	150 ³	230 ³
Источник излучения, шт. x Вт	2 x 30		
Потребляемая мощность, не более, ВА	100		

^{1,2,3} В зависимости от бактерицидного потока ламп.

		6	6	6	6
НОП H@P	Philips	30	11 ¹	9000	G13
ВН H@NT	LightTech				
" E M H@P	Osram				
H@	НИИИС им. А. Н. Лодыгина		10 ²		
" H@NT	Китай		9 ³	8000	

6

V

Объем помещения, м ³	F@	H@	I@	N@	U@	CF@
»	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин
»»	6,5 мин	10 мин	13 мин	19 мин	30 мин	40 мин
»»»	4 мин	6 мин	8,5 мин	13 мин	19 мин	25 мин

- Облучатель оснащается электронным **счетчиком** с возможностью сброса показаний.
- Регистрация времени осуществляется - при выключенных лампах.
- Использование для «мягкого» пуска УФ-лампам, дает возможность полностью выработать их ресурс, указанный производителем.
- Применены конструктивные решения, существенно бактерицидных ламп.
- Защитные торцевые корпуса позволяют защитить от пыли размещенные в нем электрические узлы и детали и
- Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей
- Как ведущее производственное предприятие, выпускающее медицинское оборудование с 1992 года, мы гарантируем уровень безотказной работы в течение всего срока службы - L
- украсит любой интерьер.