

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
В.И. П. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

В.А. Аникин

« »

2004г.



Кресло гинекологическое стационарное с фиксированным по высоте сидением и регулируемой по наклону спинке КГс-02-«Диакомс», в комплекте со ступенькой и выдвижным тазиком.

Кресло гинекологическое передвижное с регулируемыми по высоте сидением и по наклону спинкой КГп-03-«Диакомс».

ПАСПОРТ

АУКС.941126.057 ПС

2004

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взл. и инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплектность	4
4. Устройство и принцип работы	4
5. Указания мер безопасности	5
6. Свидетельство о приемке	6
7. Свидетельство об упаковке	6
8. Гарантии поставщика	7
9. Сведения о рекламациях	7

				АУКС.941126.057 ПС							
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Кресла гинекологические КГс-02 – «Диакомс» КГп-03 – «Диакомс»			Лит.	Лист	Листов	
Разработал		НИКИТИНА		02.02.04						2	9
Проверил		ЗУЕНКОВ		02.02.04							
Нач. отдела											
Н. контроль											
Утвердил		ЗУЕНКОВ		02.02.04	Паспорт						

1. Назначение изделия.

- 1.1. Кресла гинекологические КГс-02-«Диакомс» (рис.1) и КГп-03-«Диакомс» (рис.2) предназначены для проведения гинекологических процедур.
- 1.2. Кресла могут применяться в женских консультациях, в смотровых кабинетах, а также в роддомах.
- 1.3. Конструкция кресел сделана из стальных труб, покрытых полимерным покрытием. Мягкие элементы ложа выполнены из пено-полиуритана и покрыты искусственной кожей, устойчивой к чистке и дезинфекции. Изменение углов наклона опоры спины, а также положения Тренделенбург и антиТренделенбург регулируются благодаря газовым пружинам с блокировкой. Кресла оснащены лотком из нержавеющей стали, упорами для рук, ногдержателями, а кресло КГс-02-«Диакомс» имеет ступеньку.
- 1.4. Кресло КГп-03-«Диакомс» имеет функцию изменения высоты. Регулировка высоты кресла осуществляется гидроподъемником при помощи ножной педали.
- 1.5. Кресло КГп-03-«Диакомс» устанавливается на колесные опоры диаметром 125 мм и может комплектоваться боковыми ограждениями.
- 1.6. Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха $22 \pm 2^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха 80% при температуре $+25^\circ\text{C}$ при более низких температурах без конденсации влаги.



Рис.1



Рис.2

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

2. Технические характеристики.

2.1. Масса кресла:

КГс-02-«Диакос» – не более 50 кг;

КГп-03-«Диакос» – не более 70 кг.

2.2. Габаритные размеры кресла, мм:

- длина - 1300;

- ширина - 600;

- высота - 1700.

- высота в положении стола – 960.

Высота кресла КГп-03-«Диакос» – 1400...1700,

Высота кресла КГп-03-«Диакос» в положении стол – 600...900.

2.3. Габаритные размеры панели кресла, мм

- длина спинной секции - 850;

- длина тазобедренной секции - 320;

- ширина секций - 550;

- высота минимальная, не более - 650.

Ход панели кресла КГп-03-«Диакос» по высоте - не менее 300 мм.

2.5. Угол наклона панели от 0° до 45°.

2.6. Угол наклона спинной секции панели от горизонтали от 0° до 80°.

2.7. Кресло при горизонтальном положении спинной секции выдерживает на панели, установленной в нижнее положение, равномерно-распределенную двухкратную номинальную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 80 кг.

2.8. Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос", "Астра" или 1% раствором хлорамина.

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки кресел должен соответствовать указанному в таблице 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1

NN П.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛ- ВО шт.
	Кресло гинекологическое КГс-02-«Диаконс»	ТУ9452-057-17099103-2004	
1.	Кресло	АУКС.942819.057	1
2.	Ногодержатель	АУКС.943221.009	2
3.	Лоток	АУКС.943221.010	1
4.	Зажим	АУКС.943221.011	2

Эксплуатационная документация

5	Паспорт	АУКС.942819.057 ПС	1
---	---------	--------------------	---

ТАБЛИЦА 2

NN П.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛ- ВО шт.
	Кресло гинекологическое КГп-03-«Диаконс»	ТУ9452-057-17099103-2004	
1.	Кресло	АУКС.942819.057-01	1
2.	Ногодержатель	АУКС.943221.009	2
3.	Лоток	АУКС.943221.010	1
4.	Зажим	АУКС.943221.011	2

Эксплуатационная документация

5	Паспорт	АУКС.942819.057 ПС	1
---	---------	--------------------	---

					АУКС.941126.057 ПС	Лист 5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. Устройство и принцип работы.

4.1. КГс-02-«Диакомс» и КГп-03-«Диакомс» состоят из кресел и навесных приспособлений.

4.2. Кресло КГс-02-«Диакомс» (Рис.1) состоит из панели и механизма её поворота, основания, откидной подножки, выдвижного лотка.

4.2.1. Панель состоит из рамы, на которую установлены две секции: сидение и спинная, которые соединены шарнирно. Обе секции имеют мягкий верх.

4.2.2. Угол наклона спинной секции и поворота панели осуществляется газовыми пружинами при нажатии управляющих ручек.

4.2.3. Панель кресла КГс-02-«Диакомс» шарнирно закреплена с основанием и может быть наклонена в положениях $0^{\circ} \dots 80^{\circ}$.

4.2.4. Панель кресла КГп-03-«Диакомс» шарнирно закреплена на механизме подъема-опускания и поворота панели и может быть наклонена в положениях $0^{\circ} \dots 80^{\circ}$.

4.2.5. Работа механизма подъема-опускания панели осуществляется гидроприводом путём нажатия на ножную педаль. На раме панели с двух сторон установлены два зажима, в которых фиксируются два ногодержателя, регулирующие по высоте, и две рукоятки и выдвижной лоток.

4.2.6. Основание кресла КГс-02-«Диакомс» представляет собой раму установленную на четырех регулируемых опорах, с прикрепленной поворотной подножкой.

4.2.7. Основание кресла КГп-03-«Диакомс» представляет собой раму установленную на четыре колесные опоры с тормозами.

5. Указания мер безопасности.

5.1. Лица, не освоившие принцип действия кресла, порядка работы на нем и правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

К самостоятельной работе по эксплуатации и техническому обслуживанию кресла допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и допущенные администрацией учреждения.

5.2. Следите за надежным креплением навесных приспособлений

					АУКС.941126.045 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло гинекологическое КГс-02 - «Диакомс» (КГс-03 - «Диакомс»)
зав. № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло гинекологическое КГс-02 - «Диакомс» (КГп-03 - «Диакомс»)
зав. № _____

упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

М.П. _____

Упаковку произвел _____

Подпись _____

Кресло гинекологическое КГс-02 - «Диакомс» (КГп-03 - «Диакомс»)
после упаковки принял _____

Подпись _____

					АУКС.941126.045 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода кресла в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.

10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в кресло вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав кресла, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание кресла.

11.2 Гарантийное обслуживание комплекта массажного производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:
111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14а, стр.45
Тел./факс: (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		9