

Копия верна  
Генеральный директор  
ООО «Диакомс»  
*В.А. Сигалов*



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  
ООО Фирма Диакомс

*В.А. Аникин*

« 06 » 2003 г.



КУШЕТКА МАССАЖНАЯ СКЛАДНАЯ  
СО СЪЕМНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ ПО ВЫСОТЕ  
ПОДГОЛОВНИКОМ  
КМС – «ДИАКОМС»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.045 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	вз. и инв. №	Подп. и дата

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdravnadzor.gov.ru](http://www.goszdravnadzor.gov.ru)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания .....	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	5
5. Условия эксплуатации.....	5
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Транспортирование и хранение.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7
11. Сведения о рекламациях .....	8

				АУКС.942819.045 ПС			
				КУШЕТКА МАССАЖНАЯ СКЛАДНАЯ КМС – «ДИАКОМС» Паспорт			
<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
Разработал	НИКИТИНА		05.03.05			2	8
Проверил	ЗУЕНКОВ		08.08.07				
Нач. отдела							
Н. контроль							
Утвердил	АНИКИН		06.05.05				

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние кушетки массажной складной КМС – «ДИАКОМС» зав. № \_\_\_\_\_.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Кушетка КМС – «ДИАКОМС» (Рис.1) может быть использована для проведения различных видов массажа и косметических процедур.
- 2.2 При складывании кушетка, ножки и подголовник убираются внутрь кушетки.
- 2.3 Кушетка имеет бесступенчатую регулировку подголовника.
- 2.4 Кушетка комплектуется чехлом.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в кушетку приведен в таблице 1.  
Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1. Кушетка	АУКС.942819.045	1
2. Подголовник	АУКС.	1
3. Чехол	АУКС.	1
4. Паспорт	АУКС.942819.045 ПС	1

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
подпись, дата

						Лист
					АУКС.942819.045 ПС	3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		



#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры в мм: длина – 2000, ширина – 500, высота – 700.
- 4.2 Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм: длина – 800, ширина – 500, толщина – 170.
- 4.3 Масса кушетки, кг, не более – 22.
- 4.4 Допустимая нагрузка на кушетку не более 150 кг.
- 4.5 Изменение угла наклона подголовника относительно горизонтального положения  $\pm 30^\circ$ .

#### 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация кушетки должна производиться в закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений изделий, входящих в комплект.

#### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в регулярном внешнем осмотре изделий входящих в кушетку и удалении возникающих в процессе эксплуатации загрязнений мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

#### 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Кушетку допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Хранение кушетки должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка массажная складная КМС – «ДИАКОМС» зав. № \_\_\_\_\_

признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

подпись представителя ОТК

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кушетка массажная складная КМС – «ДИАКОМС» зав. № \_\_\_\_\_

упакована на предприятии \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Подпись

Кушетку массажную складную КМС – «ДИАКОМС» после упаковки принял \_\_\_\_\_

Подпись

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки массажной складной требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода кушетки массажной складной в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
  - при нарушении правил эксплуатации;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в кушетку массажную складную вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав кушетки массажной складной, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание кушетки массажной складной.

11.2 Гарантийное обслуживание кушетки массажной складной производит предприятие «Диакос», расположенное по адресу: 111250, г. Москва, Красноказарменный пр-д, д. 14а.  
Тел./факс : (095) 361-55-37, (095) 361-55-68.

11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.942819.045 ПС	Лист 8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		