

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»

И.А. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

И.К. Лакин

И.К. Лакин

« 23 » 1998 г.



КОМПЛЕКТ МАССАЖНЫЙ

МК-5

ПАСПОРТ

АУКС.941126.005 ПС

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

1998г

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Технические характеристики.....	4
5. Условия эксплуатации.....	5
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Транспортирование и хранение.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7
11. Сведения о рекламациях.....	8

					АУКС.941126.005 ПС					
	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	КОМПЛЕКТ МАССАЖНЫЙ МК-5		<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	
<i>Разработал</i>		НИКИТИНА		20.02.28					2	8
<i>Проверил</i>		ЗУЕНКОВ		20.02.28						
<i>Нач. отдела</i>										
<i>Н. контроль</i>										
<i>Утвердил</i>		ЛАКИН		20.02.28	Паспорт					

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние комплекта массажного МК-5 зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 В комплект массажный МК-5 входят массажная кушетка и цилиндрический валик. Кушетка массажная снабжена приспособлением для изменения угла наклона отдела подголовника.
- 2.2 Высота кушетки регулируется гидравлическим подъемником с помощью ножной педали и рычага.
- 2.3 Комплект массажный МК-5 предназначен для проведения лечебного гигиенического массажа, мануальной терапии и других физиотерапевтических манипуляций.
- 2.4 Комплект массажный МК-5 может быть использован для массажных кабинетов, оснащения клиник, больниц и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.



									Лист
									3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АУКС.941126.005 ПС				

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в комплект массажный МК-5 приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол-во шт.
1. Кушетка массажная	АУКС.942819.019	1
2. Цилиндрический валик	АУКС.943221.007	1
3. Паспорт	АУКС.941126.005 ПС	1

Представитель ОТК _____

Подпись, дата

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры, мм:
кушетки - длина – 2010, ширина – 700, высота – 640...1000;
цилиндрического валика - длина – 500, Ø - 150.
- 4.2 Масса, кг:
кушетки массажной – 65,0;
цилиндрического валика - 3,0.
- 4.3 Допустимая равномерная нагрузка на массажную кушетку – 150 кг:
- 4.4 Максимальный угол наклона подголовника массажной кушетки относительно горизонтального положения $\pm 35^\circ$.

АУКС.941126.005 ПС

Лист

4

Изм. Лист № документа Подпись Дата

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация комплекта массажного должна производиться в закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений изделий, входящих в комплект.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в регулярном внешнем осмотре изделий входящих в комплект массажнй и удалении возникающих в процессе эксплуатации загрязнений мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Комплект массажный допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Хранение комплекта массажного должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

					АУКС.941126.005 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект массажный МК-5 зав. № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Комплект массажный МК-5 зав. № _____

упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку произвел _____

Подпись

Комплект массажный после упаковки принял _____

Подпись

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdramnadzor.ru

					АУКС.941126.005 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта массажного требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода комплекта массажного в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в комплект массажный вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

					АУКС.941126.005 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав комплекта массажного, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание массажного комплекта.

11.2 Гарантийное обслуживание массажного комплекта производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу: 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 45
Тел./факс: (495) 361-55-37, тел. (495) 361-55-68.

11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

				АУКС.941126.005 ПС	Лист
					8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
8 листов
Генеральный директор
ООО «Диакомс»

 М. И. Сигалов



www.goszdravnadzor.ru