

## **Кровать медицинская**

### **Тип « КОМ »**

#### **Паспорт**

Настоящий паспорт распространяется на кровати медицинские КОМ 01; КОМ 01-3; КОМ 01-6; КОМ 02; КОМ 02-1; КОМ 02-2; КОМ 02-3, предназначенные для оснащения медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

#### **1 Основные параметры и характеристики**

Длина спального места - 1950 мм.

Ширина спального места – 800 мм.

Высота от пола до верхней кромки спального места – 445мм.

Лежак кровати КОМ 02-1 оснащен подголовником для подъема головы.

Лежак кровати КОМ 02-2 оснащен подголовником для подъема головы и двумя секциями для подъема ног.

#### **2 Комплектность**

Кровать – 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

#### **3 Подготовка к работе**

Кровать поставляется в разобранном виде и собирается без дополнительной подгонки, путем установки клиньев лежака в петли на спинках. Опускание и подъем подголовника и секций ног производится при помощи ручек.

Допускается дезинфекция поверхностей кроватей химическим методом по ОСТ 42-21-2, путем протирания салфеткой, смоченной в 3 % растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-468938716.

#### 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление кровати невозможно или экономически нецелесообразно.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения - 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

#### 5 Свидетельство о приемке

Кровать КОМ \_\_\_\_\_

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфе  
www.

**ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ**

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровати медицинские: КОМ 01	Кровать металлическая без колес КМ 001  Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01 901 от 03.03.2010
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Промтех-НН», г.Н.Новгород, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	<b>Габаритные размеры, мм:</b>
Длина - 2014	Длина - 2000
Ширина - 804	Ширина - 865
Высота - 800	Высота - 810
Масса - 18,5 кг	Масса - 25 кг
<b>Каркас кровати</b> изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием. <b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65. <b>Спинки кровати</b> - полукруглые, съемные.	<b>Каркас кровати</b> изготовлен из тонкостенного стального профиля с полимерным порошковым покрытием. <b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x50. <b>Спинки кровати</b> - съемные.

Генеральный директор

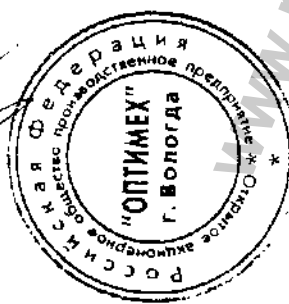



Н.Е. Лешуков

**ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ**

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровать медицинская КОМ 01-3	Кровать металлическая без колес КМ 001  Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01 901 от 03.03.2010
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Промтех-НН», г.Н.Новгород, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
Габаритные размеры, мм:	Габаритные размеры, мм:
Длина - 2014	Длина - 2000
Ширина - 804	Ширина - 865
Высота - 800	Высота - 810
Масса - 20 кг	Масса - 25 кг
<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - полукруглые, съемные.</p>	<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из тонкостенного стального профиля с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x50.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - съемные.</p>

Генеральный директор

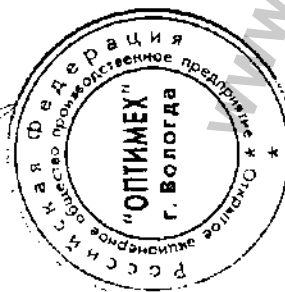Н.Е. Лешуков

**ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ**

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровать медицинская КОМ 01-6	Кровать металлическая без колес КМ 001 Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01 901 от 03.03.2010
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Промтех-НН», г.Н.Новгород, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
Габаритные размеры, мм:	Габаритные размеры, мм:
Длина - 2014	Длина - 2000
Ширина - 804	Ширина - 865
Высота - 800	Высота - 810
Масса – 20,5 кг	Масса – 25кг
Каркас кровати изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием. Лежак кровати - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65. Спинки кровати - полукруглые, съемные.	Каркас кровати изготовлен из тонкостенного стального профиля с полимерным порошковым покрытием. Лежак кровати - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x50. Спинки кровати - съемные.

Генеральный директор



Н.Е. Лешуков

**ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ**

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровати медицинские: КОМ 02	Кровать металлическая без колес КМ 001  Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01 901 от 03.03.2010
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Промтех-НН», г.Н.Новгород, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	<b>Габаритные размеры, мм:</b>
Длина - 2014	Длина - 2000
Ширина - 804	Ширина - 865
Высота - 800	Высота - 810
Масса - 21,0 кг	Масса - 25кг
Каркас кровати изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием. Лежак кровати - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65. Спинки кровати - прямоугольные, съемные.	Каркас кровати изготовлен из тонкостенного стального профиля с полимерным порошковым покрытием. Лежак кровати - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x50. Спинки кровати - съемные.

Генеральный директор



Н.Е. Лешуков

## ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровать медицинская КОМ 02-1	Кровать общебольничная КФО-01-«МСК» (МСК-105)  Регистрационное удостоверение № 29/16010201/2073-04 от 09.03.2004
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Медстальконструкция», г.Уфа, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	<b>Габаритные размеры, мм:</b>
Длина - 2014	Длина - 2050
Ширина - 804	Ширина - 900
Высота - 800	Высота - 840
<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - прямоугольные.</p> <p><b>Угол наклона подголовника:</b> от 0° до 45°.</p>	<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из тонкостенного стального профиля с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, размер ячейки 50x50.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - прямоугольные.</p> <p><b>Угол наклона подголовника:</b> от 0° до 45°.</p>

Генеральный директор




Н.Е. Лешуков



**ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ**

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровать медицинская КОМ 02-2	Кровать функциональная КФЗ-01-«МСК» Регистрационное удостоверение № 29/16010201/2074-03 от 03.06.2003
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимер», г.Вологда, Россия	ООО «Медстальконструкция», г.Уфа, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	<b>Габаритные размеры, мм:</b>
Длина - 2014	Длина - 2050
Ширина - 804	Ширина - 800
Высота - 800	Высота - 780
<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - прямоугольные.</p> <p><b>Угол наклона подголовника:</b> от 0° до 45°.</p>	<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из стального профиля с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка с размером ячейки 50x50.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - прямоугольные.</p> <p><b>Угол наклона подголовника:</b> от 0° до 45°.</p>

Генеральный директор



Н.Е. Лешуков

**ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ**

Основные данные	Аналог
<b>Наименование и назначение</b>	
Кровати медицинские: КОМ 02-3	Кровать металлическая без колес КМ 001  Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01 901 от 03.03.2010
<b>Предприятие-изготовитель, фирма, страна</b>	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Промтех-НН», г.Н.Новгород, Россия
<b>Основные характеристики</b>	
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	<b>Габаритные размеры, мм:</b>
Длина - 2014	Длина - 2000
Ширина - 804	Ширина - 865
Высота - 800	Высота - 810
Масса - 23,5 кг	Масса - 25 кг
<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из швеллера и уголка с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x65.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - прямоугольные со вставками из ЛДСП, съемные.</p>	<p><b>Каркас кровати</b> изготовлен из тонкостенного стального профиля с полимерным порошковым покрытием.</p> <p><b>Лежак кровати</b> - сварная сетка, жесткая, изготовлена из проволоки диаметром 5 мм с размером ячейки 100x50.</p> <p><b>Спинки кровати</b> - съемные.</p>

Генеральный директор



Н.Е. Лешуков