



Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



АЯ74

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

Кровать функциональная двухсекционная
КФВ-1

Паспорт тЦД3.541.006 ПС

ОКП 94 5210

1 Назначение изделия, технические характеристики, комплектность

1.1 Кровать предназначена для оснащения лечебных учреждений.

1.2 Габаритные размеры, мм:

длина (по замку) - 2280 ± 50 ; длина (по колесам) - 2210 ± 50 ; ширина - 876 ± 50 ;
высота (по приспособлению для подтягивания) - 1730 ± 50 ; высота (по спинке) - 1000 ± 25 .

1.3 Масса, кг, не более - 80

1.4 Угол наклона спинной секции панели от горизонтали, град., не менее - 60

1.5 Средний срок службы, не менее, лет - 5

1.6 Кровать выдерживает двухкратную номинальную нагрузку.

За номинальную принимается нагрузка, кг - 80 ± 2

1.7 Приспособление для подтягивания
выдерживает нагрузку массой, кг - 40 ± 1

1.8 Комплектность кровати указана в таблице.

Наименование	Обозначение документа	Количество, штук
1. Кровать функциональная двухсекционная (без съемных частей)	тЦД3.541.006	1
Съемные части (поставляются по заявке потребителя)		
2. Приспособление для подтягивания	тЦД6.153.003	1
3. Боковое ограждение	тЦД6.437.003-01	2
4. Корзина под судно	тЦД6.122.008	1
5. Штатив для вливаний	2055312000	1
6. Матрац в чехле из ткани	тЦД6.409.004	1
7. Матрац в чехле из винилискожи	тЦД6.409.009	1
8. Матрац в чехлах из ткани и винилискожи	тЦД6.409.009-05	1
Эксплуатационная документация		
9. Паспорт	тЦД3.541.006 ПС	1 экз.

Примечание – Допускается поставка кроватей в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет. В соответствии с условиями договора допускается поставка любой комплектности из указанной в таблице.

2 Устройство, подготовка и порядок работы, меры безопасности

2.1 Кровать (при максимальной комплектности) (см. рисунок) состоит из панели ложа 1, двух спинок 5 и 6 (с колесами 16 или без колес), приспособления для подтягивания 3, боковых ограждений 7, штатива для вливаний 17, корзины под судно 2 и матраца 4.

2.2 Распакуйте кровать, удалите антикоррозионную смазку, тампоном из ваты, смоченным спиртом, установите панель ложа 1 на спинки 5 и 6 согласно рисунка и закрепите восемью болтами 11 с шайбами, отвернув их предварительно из крепежных отверстий спинки.

2.3 Навесьте корзину под судно 2 (при наличии), вставив снизу штырь корзины во втулку, на необходимой вам стороне кровати, оденьте на штырь шайбы 9 и 13 и закрепите гайкой 12. Во избежание самоотвинчивания шайбу 9 отогнуть на гайку 12. Шайбы и гайку перед сборкой предварительно отверните со штыря корзины.

2.4 Боковое ограждение 7 (при наличии) вставить во втулки панели ложа 1 и зафиксировать винтами, установленными во втулках снизу. При необходимости ограждение можно установить в нижнее положение, сняв и перевернув его вверх направляющими, затем установить во втулки с последующим креплением винтами втулок.

2.5 Приспособление для подтягивания 3 (при наличии) вставить отверстием на буж нижней поперечины головной спинки, закрепить винтом 8 на буже и замком 10 на верхней трубе спинки.

2.6 Для придания спинной панели наклонного положения поднять ее и установить опорную рамку 14 в пазы гребенок 15, соответствующие выбранному наклону. (Изменение угла наклона производить в ненагруженном состоянии).

2.7 Торможение колес (при наличии) осуществляется путем нажатия вниз на крайнее плечо педали колеса, растормаживание - путем нажатия вниз на противоположное плечо педали

2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использование кровати с погнутыми или сломанными частями, ненадежно закрепленными приспособлениями и узлами, а так же с другими неисправностями.

2.9 После каждой регулировки частей кровати убедитесь в надежности их крепления и фиксирования, при этом в пазы обеих гребенок при регулировке спинной панели должны полностью входить в штыри опорной рамки.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию заключается в проверке, при эксплуатации раз в квартал, и подтяжке резьбовых соединений спинок и рамы винтами 11, колес, раз в неделю необходимо проверять и подтягивать замком 10 и винтом 8 к спинкам приспособление для подтягивания. При необходимости, производится замена годными деталями изношенных, промывка и смазка подшипниковых узлов колес консистентной смазкой.

3.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кровати, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

4 Консервация

4.1 Металлические детали кровати и съемных приспособлений должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Кровать функциональная двухсекционная КФВ-1, зав.№ _____ подвергнута в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-027-07614107-2004.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя(поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-027-07614107-2004.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность кровати и не гарантирует ее работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку кровать не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Кровать функциональная двухсекционная

КФВ-1

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.


Служба качества

М.П.

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

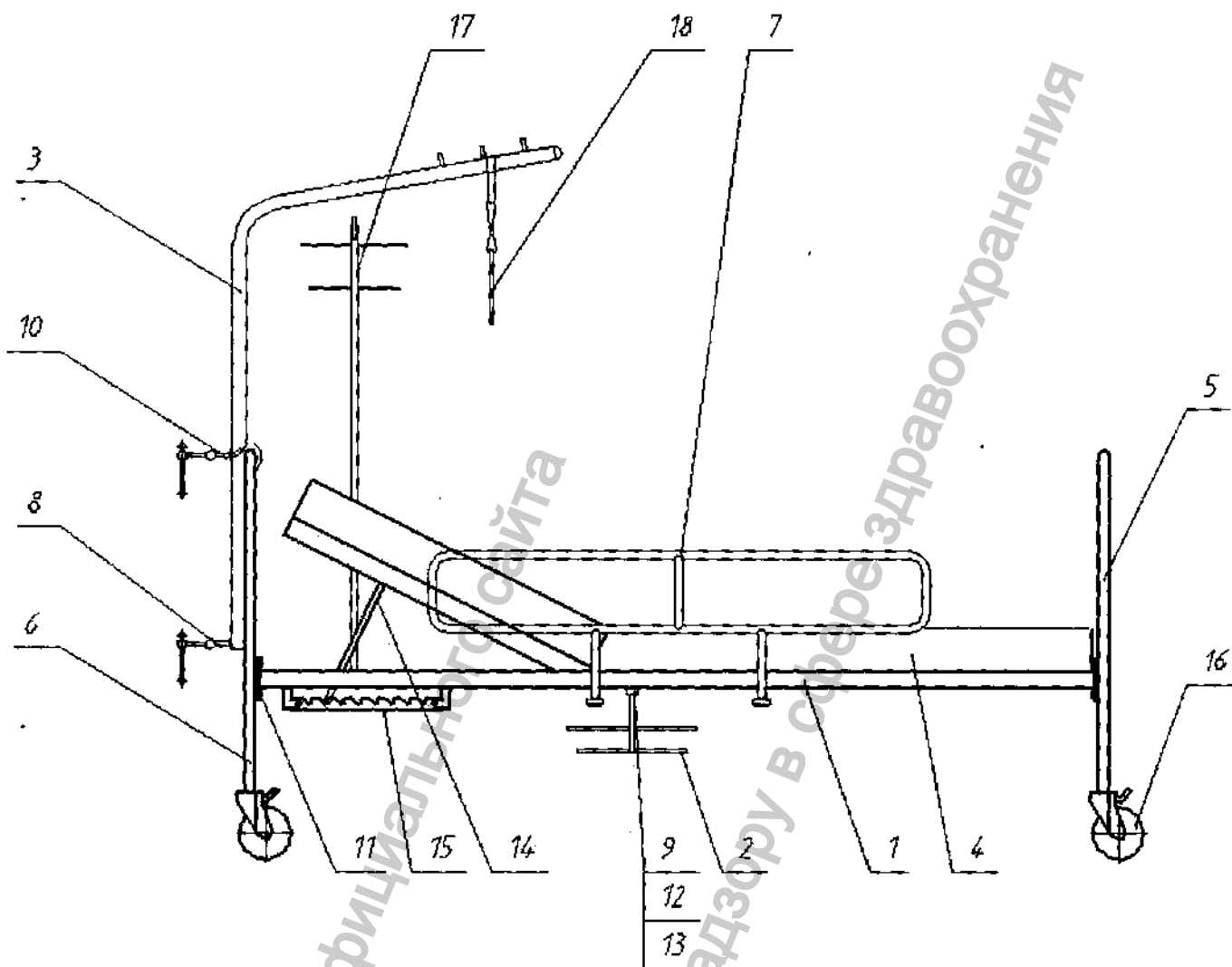

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdraznadzor.ru

Протипировано,
Пр
На
Г

