

ОКП 94 5210

ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»

Столик манипуляционный
СМ-3
Паспорт 4Ц6209.00.000 ПС

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

1 Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1 Столик предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и т.п. и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса.

Климатическое исполнение УХЛ4.2 ГОСТ Р 50444.

1.2 Габаритные размеры столика, мм:

длина – 775 ± 50 , ширина – 515 ± 50 , высота – 955 ± 50 .

1.3 Масса, кг, не более 27

1.4 Допускаемая нагрузка на полки (общая) массой, кг, не более 25

1.5 Усилие выдвижения ящика, кгс, не более 5

1.6 Усилие передвижения столика, кгс, не более 8

1.7 Средний срок службы, лет, не менее 5

1.8 Комплектность столика приведена в таблице.

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт
1. Столик манипуляционный СМ-3 (без съемных частей)	4Ц6209.00.000	1
<u>Съемные части</u>		
2 Кронштейн	тЦ6.136.005	1
3 Тазик почкообразный	ТУ 64-1-686	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
4 Паспорт	4Ц6209.00.000 ПС	1 экз.

Примечание - Допускается поставка другой комплектности в соответствии с условиями договора на поставку продукции.

2 Устройство, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

2.1 Столик (см. рис.) состоит из основания поз.1 на самоориентирующихся колесах поз.2, на котором закреплены три панели (полки) поз.3 и выдвижной ящик поз.4 с замком для хранения инструментов, медикаментов и т.п.

Поворотный кронштейн поз.5 служит для размещения почкообразного таза 6. Две ручки поз.7 служат для перемещения столика. Столик снабжен четырьмя самоориентирующимися колесами поз.2.


2.2 Для подготовки к работе распакуйте столик и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку столика.

2.3 Запрещается использование неисправного столика. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания столика, избегайте резких рывков или ударов столика при его перемещении.

2.4 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке.

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех

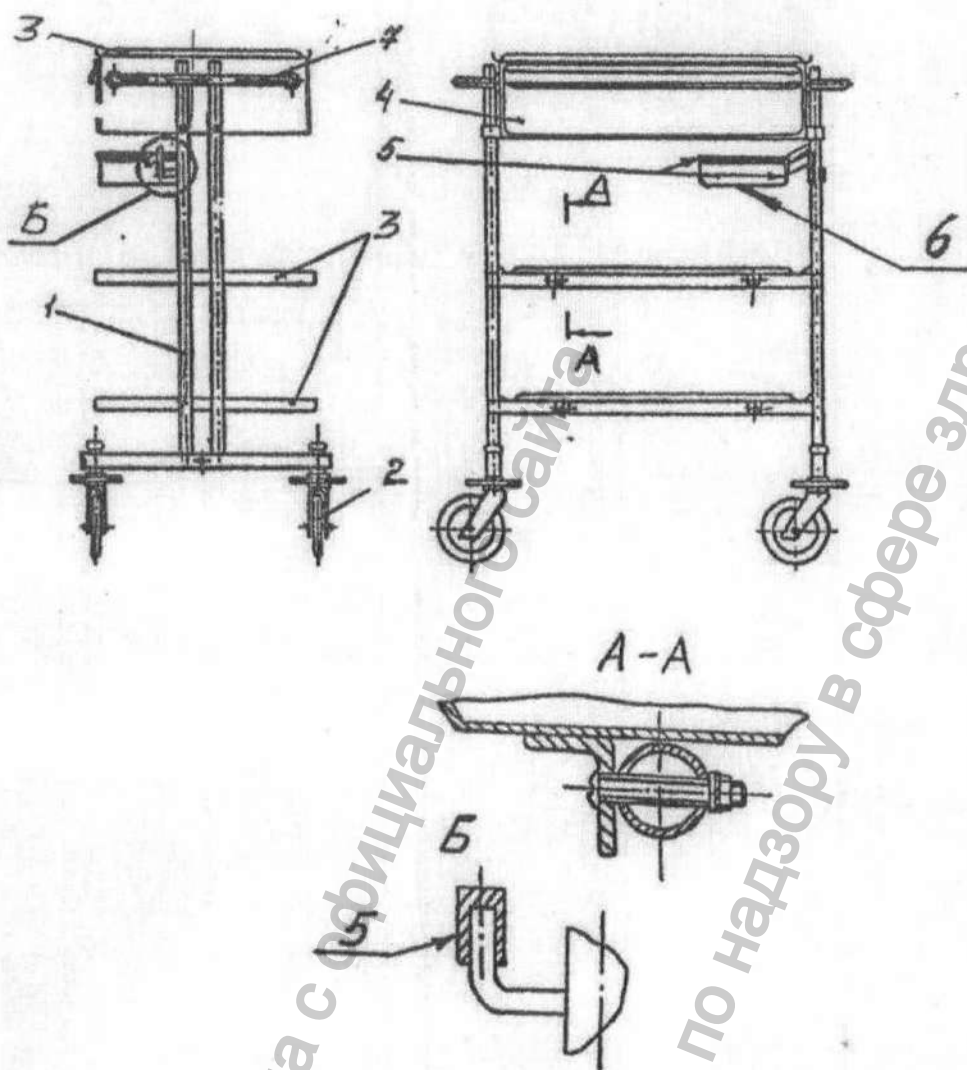

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

4

видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных, или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес, любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке столика.

3.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования столика, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

3.3 Столики в упаковке изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98 % при 25°C . Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Может транспортироваться на любом виде закрытого транспорта.

3.4 Срок хранения без переконсервации – 3 года.

4 Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

4.2 В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кровать или ее части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт и указанием адреса, где находится изделие, номера телефона. Также необходимо выслать сломанную деталь, если высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости.

Рекламации на столик и его части, подвергнутые ремонту у потребителя заводом не удовлетворяются.

5 Свидетельство о приемке
Столик манипуляционный СМ-3

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей НТД и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

Мастер

М.П.

(личная подпись)

(личная подпись)

(расшифровка подписей)

(год, месяц, число)

Прошнуровано,

Пронумеровано и скреплено

На 4/4 (четыре)

Ген. директор



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.goszna.ru

лено печатью
листах
А.В.Ростров

Информация получена с официального сай

Федеральной службы по надзору в сфере

www.gosz