


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «МЕДПЛАНТ»

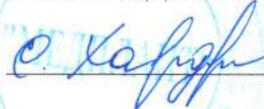

С.М. Хардина

«15» мая 2020 г.

Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях УППчс-01-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012

Руководство по эксплуатации

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdramnadzor.ru](http://www.goszdramnadzor.ru)

**УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях**

**УППчс-01-«Медплант»**

**Руководство по эксплуатации**  
ЛКЯМ.942419.001.003 РЭ



*Перед началом работы с набором  
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

Ver 005

**Назначение:** Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях УППчс-01-«Медплант» предназначена для оказания неотложной медицинской помощи при несчастных случаях и экстремальных ситуациях на месте происшествия.

**Область применения:** службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильные спасательные формирования.

**Технические характеристики :**

Наименование характеристики	Значение	
	В сумке СМУ-04	В футляре-укладке УМСП-01-П/З
Габаритные размеры, мм (Длина x ширина x высота)	540x300x360	520x310x390
Масса, кг, не более	8,5	11,5

**Комплект поставки :**

1. Набор вложений согласно таблице №1
2. Футляр-укладка УМСП-01-П/З со сдвоенными лотками или сумка СМУ-04
4. Руководство по эксплуатации.

**Описание изделия :** Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях УППчс-01-«Медплант» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному персоналу служб экстремальной медицины и медицины катастроф оказывать первую помощь при несчастных случаях и экстремальных ситуациях на месте происшествия. Набор может быть упакован в футляр-укладку УМСП-01-П/З (ТУ 9437-006-52777873-2010) или в сумку медицинскую универсальную СМУ-04.

**Футляр-укладка УМСП-01-П/З** изготовлена из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие ее открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра-укладки выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра-укладки обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора. Наборы в футлярах-укладках поставляются с ремонтным комплектом.

На верхней поверхности футляра-укладки имеется окно для информационной таблички и светоотражающие полосы для более удобной работы в тёмное время суток. Вложения в футляре-укладке размещаются как в верхних створках так и на дне футляра. Внутри футляров-укладок имеется специальные вкладыши для размещения перевязочных средств и чехол для инструментов, для более удобной работы с вложениями.

Футляр-укладка надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре-укладке особенно удобен для частого использования, например, в условиях бригады СМП.

**Сумка СМУ-04** имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолон ППЭ. Дно сумки выполнено из специальной прорезиненной ткани и снабжено «пукляями» для устойчивого вертикального положения сумки.

Сумка имеет внешние и внутренние карманы для удобства размещения медицинского и личного имущества. На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный объёмный отсек (на молнии) для складных шин, оборудованный держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.). С внутренней стороны крышки расположен объёмный карман с прозрачными стенками для размещения дыхательного мешка и аксессуаров.

По периметру сумка снабжена внешними боковыми карманами:

- плоский карман для бланков и других бумаг,
- плоский карман для комплектов одноразового белья или салфеток,
- объёмный карман для шин-воротников,
- объёмный карман для пакетов для сбора отходов и мусора.

Благодаря такой конструкции на дне сумки помещаются перевязочные материалы и инструменты, к которым обеспечен полный быстрый доступ и обзор. Вложения на дне сумки уложены в специальные вкладыши с ручками для удобства их извлечения.

Конструкция сумки снабжена усиленными молниями и дополнительными наружными мини-ручками и петлями для простоты открывания секций и скорости в работе. По всему корпусу сумки расположена

светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток, а накладка на плечевом ремне предохраняет его от сминания.

**Подготовка к работе и правила работы с укладкой :**

- 1) Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.
- 2) Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора (тонометр, комплект дыхательный КД-МП-В, аспиратор, средства иммобилизации).
- 3) Футляр-укладка/сумка СМУ-04 защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к перемещению и поломке элементов внутри набора и нарушению стерильности вложений. При хранении и транспортировке футляр-укладка/сумка СМУ-04 должна быть всё время ориентирована вертикально. Бережное отношение и аккуратная работа с набором продлевает срок его службы.
- 4) После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр-укладку/сумку СМУ-04, для его упаковки используйте полиэтиленовые пакеты, входящие в состав набора. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в футляр-укладку/сумку СМУ-04 только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. Своевременно пополняйте состав расходных материалов, помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.
- 5) При необходимости дезинфекция сумки СМУ-04 и футляра-укладки производится 2-х кратным протиранием салфеткой, смоченной в 3 %-ном растворе хлорамина, с интервалом 15 мин. и выдержкой после этого 60 мин. (по МУ287-113).

**Обработка сумки спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается!!!**

При необходимости сервисного обслуживания футляра-укладки и получения запасных элементов конструкции (винтов, пластмассовых втулок и т.д.) обращайтесь к изготовителю по адресу и телефонам, указанным в настоящем руководстве и на этикетке, наклеенной на футляр-укладку, в течение гарантийного срока.

**Гарантии изготовителя:** Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на вложения (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций).

**Контактная информация производителя**

ООО «МЕДПЛАНТ», адрес. Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт. 2, пом. I, ком. 296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

**Свидетельство о приёмке:** Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях

наименование	артикул
УППчс-01-«Медплант» в сумке	1417
УППчс-01-«Медплант» в футляр-укладке	410

соответствует ТУ 9437-002-91531720-2012 и признана годной к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

**Перечень вложений укладки:**

Наименование	кол-во
--------------	--------

Табл. 1

<i>Средства иммобилизации</i>	
1. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных («рука», «нога»)	1 комплект.
2. Шина-воротник транспортная	1 шт.
<i>ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИВЛ</i>	
3. Комплект дыхательный для ручной ИВЛ	1 шт.
4. Воздуховоды	1 набор
5. Устройство для проведения ИВЛ «рот-устройство-рот» типа УДР *	1 шт.
6. Аспиратор (отсасыватель) портативный механический	1 шт.
<i>Перевязочные и кровоостанавливающие средства</i>	
7. Салфетка дезинфицирующая для обработки рук *	6 шт.
8. Бинт марлевый мед. стерил. размером 5м x10 см.*	3 шт.
9. Бинт марлевый мед. стерил. размером 7м x14 см. *	3 шт.
10. Салфетки марлевые мед. стерил. размером 16 см 14 см *	1 уп.
11. Салфетки марлевые стерильные 45см x 29см*	1 уп.
12. Салфетка кровоостанавливающая «Гемотекс» *	1 шт.
13. Салфетка кровоостанавливающая «Активтекс» *	1 шт.
14. Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками *	3 шт.
15. Пакет гипотермический *	2 шт.
16. Бинт эластичный трубчатый *	1 компл.
17. Лейкопластырь рулонный размером 2 см x 5 м *	1 рулон
18. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
<i>Инструменты</i>	
19. Роторасширитель винтовой	1 шт.
20. Языкодержатель	1 шт.
21. Скальпель	1 шт.
22. Пинцет медицинский	1 шт.
23. Зажим медицинский	1 шт.
24. Ножницы медицинские	1 шт.
<i>Изделия для инъекций и инфузий</i>	
25. Жгут для в/в инъекций	1 шт.
26. Салфетка для инъекций *	10 шт.
27. Шприц одноразовый 2, 5, 10, 20 мл. *	(2,2,2,4) шт.
28. Инфузионная система	2 шт.
29. Катетеры для периферических вен ("канюля") *	2 шт.
<i>Прочие медицинские изделия</i>	
30. Тонометр с фонендоскопом	1 шт.
31. Перчатки стерильные *	2 пары
32. Перчатки медицинские нестерильные *	8 пар
33. Пакеты полиэтиленовые (для загрязнённого имущества) *	5 шт.
34. Держатели инфузионных флаконов 400 и 200 мл.	по 1 шт.
35. Ампульница тканевая ПВХ	1 шт.

**Примечание:** изделия отмеченные знаком \* являются одноразовыми, повторному использованию они не подлежат.

*Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу набора – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.*

Всего прошито, пронумеровано, скреплено

печатью     -5-    

цифрами

(     нет     )

прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДПЛАНТ"

Хардина С.М.     С.М. Хардина    

подпись



Информация получена с официального  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdravnadzor.ru