

Инв. № подл.	Подп. и дата	взаим. инв. №	Подп. и дата

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Диаконс»**

М.И. Сигалова

2020 г.



**ТЕЛЕЖКА ВНУТРИКОРПУСНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ,
С ПОДГОЛОВНИКОМ И СЪЕМНЫМИ НОСИЛКАМИ**

ТВПБ – «Диаконс»

в вариантах исполнения (см. Приложение)

ПАСПОРТ

АУКС.942819.033 ПС

2020 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Технические характеристики.....	7
5. Условия эксплуатации.....	8
6. Техническое обслуживание.....	9
7. Утилизация.....	9
8. Транспортирование и хранение.....	10
9. Свидетельство о приемке.....	10
10. Свидетельство об упаковке.....	10
11. Гарантии изготовителя.....	11
12. Сведения о рекламациях.....	12
13. Приложение.....	13

					АУКС.942819.033 ПС					
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Тележка ТВПБ – «Диаконс» в вариантах исполнения (см. Приложение) Паспорт			Лит.	Лист	Листов
Разработал	НИКИТИНА	<i>[подпись]</i>	25.10.2010						2	13
Проверил	ЗУЕНКОВ	<i>[подпись]</i>	25.10.2010							
Нач. отдела										
Н. контроль										
Утвердил	ЗУЕНКОВ	<i>[подпись]</i>	25.10.2010							

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние «Тележки внутрикорпусной для перевозки больных, с подголовником и съемными носилками ТВПБ – «Диакомс» по ТУ 9451-033-17099103-2002», в вариантах исполнения (см. Приложение) (в дальнейшем тележка) зав. № _____.

Производитель
ООО «Диакомс»: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.29, стр.1
тел. (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Тележка предназначена для перевозки больных в лечебных учреждениях.
2.2 Конструктивно тележка представляет собой каркас, установленный на четыре колесные опоры, со съемными носилками. Две колесные опоры по диагонали имеют тормозные устройства. Тележка комплектуется матрасом.
2.3 Изделие имеет три варианта исполнения:

Вариант1 (АУКС.942819.033) - носилки с регулируемым подголовником и матрасом, тележка и носилки изготавливаются из стальной трубы и листа с полимерным покрытием (Рис.1);

Вариант2 (АУКС.942819.033-01) - носилки имеют подголовник в виде съёмной подушки на матрасе, тележка и носилки изготавливаются из нержавеющей трубы и листа AISI 304 без покрытия, а также носилки имеют четыре откидные ручки и четыре роликовых бамперов по краям носилок. Носилки фиксируются на тележке при помощи двух фиксаторов (Рис.2);

Вариант3 (АУКС.942819.033-02) - носилки имеют подголовник в виде части матраса, тележка и носилки изготавливаются из стальной трубы и листа с полимерным покрытием (Рис.3);

Во время нахождения пациента на носилках тележки матрас должен быть покрыт простыней.

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в тележки приведен в таблице 1,2,3

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АУКС.942819.033	Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с подголовником и съемными носилками ТВПБ – «Диакомс» в составе: Тележка Носилки Матрац	1 1 1
АУКС.942819.033 ПС	Паспорт	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АУКС.942819.033-01	Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с подголовником и съемными носилками ТВПБ – «Диакомс» в составе: Тележка Носилки Матрац Подушка	1 1 1 1
АУКС.942819.033 ПС	Паспорт	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АУКС.942819.033-02	Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с подголовником и съемными носилками ТВПБ – «Диакомс» в составе:	
	Тележка	1
	Носилки	1
	Матрац	1
АУКС.942819.033 ПС	Паспорт	1

Представитель ОТК _____

Подпись, дата



Рис.1

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		5



Рис.2



Рис.3

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		
Ф2.106-5а					Копировал	Формат А

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Габаритные размеры и масса составных частей тележки в таблице 4,5,6

Таблица 4

Наименование составных частей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Тележка	1255	572	845	15
Носилки	2105	567	219	15
Матрац	1960	520	22	1,85

Таблица 5

Наименование составных частей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Тележка	1400	570	780	17
Носилки	2100	710	365	16
Матрац	1800	500	40	2,1
Подушка	350	430	125	1,5

Таблица 6

Наименование составных частей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Тележка	1600	600	900	11,5
Носилки	2315	580	210	14,8
Матрац	2000	530	22	1,8

4.2 Масса изделия не более – 35,5 кг.

4.3 Допустимая равномерная нагрузка – до 150 кг.

4.4 Угол наклона подголовника: 0°, 15°, 30°, 45°.

4.5 Диаметр колесных опор не более – 200 мм, две из которых имеют тормозное устройство.

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Транспортировка тележки может осуществляться одним человеком.
- 5.2 Для фиксации положения тележки следует поставить на тормоз колесные опоры с тормозным устройством.
- 5.3 Угол наклона подголовника изменяется вручную.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание изделия состоит из ежедневного профилактического осмотра и ежедневного технического обслуживания, включающего чистку и дезинфекцию изделия.

6.2 Техническое обслуживание осуществляется медицинским персоналом, эксплуатирующим систему.

ВНИМАНИЕ

Перед обслуживанием изделия необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, мерами безопасности и учитывать их во время работы

ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание шасси медицинского изделия проводится персоналом технической службы медицинского учреждения с соблюдением требований настоящей эксплуатационной документации!

6.3. Ежедневный профилактический осмотр должен производиться перед началом эксплуатации и включать:

- проверку целостности всех конструктивных элементов изделия;
- чистку поверхностей изделия в случае его загрязнения;
- дезинфекцию наружных поверхностей изделия;

6.4. Чистка и дезинфекция изделия

6.4.1. Составные части изделия должны подвергаться предварительной очистке, дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации в соответствии с требованиями МУ-287-113-98 и ОСТ 42-21-2-85.

Для каждой составной части предусмотрен свой вариант обработки.

6.4.2. Чистку и дезинфекцию изделия следует проводить после каждого использования изделия по назначению.

- очистку проводить ручным способом, немедленно после исследования удалив загрязнения с наружных и внутренних поверхностей, не допуская подсыхания загрязнений. Очистку проводить с помощью одноразовых марлевых (тканевых) салфеток, смоченных 2%-ным раствором нейтрального мыла (салфетки должны быть отжаты) и удалить загрязнения;

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕЛЕЖКИ.

По истечении срока службы, а также в случае списания в результате выхода из строя, изделие подлежит утилизации в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Для получения дополнительной информации следует связаться с местными управлениями охраны окружающей среды или муниципальными органами и соответствующими организациями, занимающимися утилизацией.

Утилизация изделия должна производиться с предварительным разбор изделия. Металлические компоненты изделия утилизируются путем вторичной переработки.

Детали из полимерных материалов должны быть предварительно демонтированы с изделия.

ВНИМАНИЕ

Утилизация изделия вместе с бытовыми отходами не допускается

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Тележки допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

8.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

8.3 Хранение тележек должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТВПБ – «Диаконс» зав. № _____, признана годной
для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Тележка ТВПБ – «Диаконс» зав. № _____, упакована на
предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П.

					АУКС.942819.033 ПС	Ли
						1
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, установленным настоящим руководством по эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также работ по техническому обслуживанию, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации системы - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

10.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие, вплоть до замены его в целом, если за этот срок изделие выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм, установленных настоящим руководством по эксплуатации. Безвозмездный ремонт изделия производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.4. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего или неосторожного обращения с изделием.

10.5. Гарантийному обслуживанию не подлежат изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации потребителем, либо вследствие ошибочных действий потребителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- самостоятельного ремонта и/или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

В этих случаях ремонт производится за счет владельца.

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						11
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав тележки, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание тележки.

- 11.2. Гарантийное обслуживание тележки производит предприятие ООО «Диакомс», расположенное по адресу:

109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 29, стр.1

Тел. (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

- 12.1 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 7.

Таблица 7

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание Рекламационного Акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						12
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с подголовником и съемными носилками ТВПБ – «Диакомс» по ТУ 9451-033-17099103-2002», в вариантах исполнения:

Вариант 1 (АУКС.942819.033), в составе:

1. Тележка – 1 шт.;
2. Носилки – 1 шт.;
3. Матрац – 1 шт.;
4. Паспорт – 1 шт.

Вариант 2 (АУКС.942819.033-01), в составе:

1. Тележка – 1 шт.;
2. Носилки – 1 шт.;
3. Матрац – 1 шт.;
4. Подушка – 1 шт.;
5. Паспорт – 1 шт.

Вариант 3 (АУКС.942819.033-02), в составе:

1. Тележка – 1 шт.;
2. Носилки – 1 шт.;
3. Матрац – 1 шт.;
4. Паспорт – 1 шт.

					АУКС.942819.033 ПС	Лист
						13
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Прошито и пронумеровано

13 листов

Ген. директор ООО «Диаконс»

М.И. Сигалова



www.roszdravnadzor.gov.ru