

Копия верна
Генеральный директор

ООО «Диакомс»
И.П. Сигааров



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

 В.А. Аникин

« 26 » 2002 г.



**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЫСОТОЙ ПЛАТФОРМЫ И ОТКИДНЫМИ БОКОВЫМИ И
ТОРЦЕВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ
ТПБР – «ДИАКОМС»**

ПАСПОРТ

АУКС.942819.025 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	взаим. инв. №	Подп. и дата

2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Лист
1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	4
5. Условия эксплуатации.....	4
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Транспортирование и хранение.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7

				АУКС.942819.025 ПС					
Лист	№ документа	Подпись	Дата	Тележка ТПБР – «Диаконс» Паспорт		Лит.	Лист	Листов	
Разработал	НИКИТИНА	<i>[Подпись]</i>	24.08.02					2	7
Проверил	ЗУЕНКОВ	<i>[Подпись]</i>	24.08.02						
Нач. отдела									
Н. контроль									
Утвердил	АНИКИН	<i>[Подпись]</i>	26.08.02						

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние тележки для перевозки больных с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми и торцевыми ограждениями ТПБР – «Диаконс» (Рис.1) (в дальнейшем тележка).

зав. № _____.

- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Тележка предназначена для транспортировки лежащих пациентов в реабилитационных и медицинских учреждениях.
- 2.2 Конструктивно тележка представляет собой установленную на четыре колесные опоры раму и ложе. Две колесные опоры по диагонали имеют тормозные устройства.
- 2.3 Ложе тележки имеет подголовник с изменяемым углом наклона, боковые отбрасываемые ограждения, и торцевые ограждения.
- 2.4 Тележка оснащена гидроприводом для изменения высоты.
- 2.5 Тележка имеет регулируемый по высоте штатив для установки капельницы. Для изменения места установки штатива с разных сторон имеются два кронштейна.
- 2.6 Гидроподъемник имеет две ножные педали.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в тележку приведен в таблице 1.
Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АУКС.942819.025	Тележка	1
	Штатив	1
	Матрац	1
АУКС.942819.025 ПС	Паспорт	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

						Лист
					АУКС.942819.025 ПС	3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры тележки в мм: длина – 2150, ширина – 680, высота ложе – 560...870.
- 4.2 Длина штатива: 1200 мм.
- 4.3 Масса изделия – 75 кг.
- 4.4 Допустимая равномерная нагрузка – до 150 кг.
- 4.5 Угол наклона подголовника: 0°, 15°, 30°, 45°.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Транспортировка тележки может осуществляться одним человеком.
- 5.2 Для фиксации положения тележки следует поставить на тормоз оба колеса с тормозным устройством.
- 5.3 Угол наклона подголовника изменяется вручную.
- 5.4 Для поворота бокового ограждения из верхнего положения вниз, необходимо поднять скобу ограждения вверх до упора и повернуть вниз на 180°.
- 5.5 Подъем ложа тележки осуществляется путем многократного нажатия на ножную педаль подъемника.
- 5.6 Опускание ложа тележки с пациентом достигается плавным подъемом педали гидроподъемника.



Рис.1

					АУКС.942819.025 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Тележка подвергается регулярному внешнему осмотру.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности, устранение неисправности должно проводиться представителями специализированной организации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Тележки допускается транспортировать в эксплуатационном положении всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.3 Хранение тележек должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.025 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТПБР – «Диаконс» зав. № _____,
признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Тележка ТПБР – «Диаконс» зав. № _____,
упакована на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П.

					АУКС.942819.025 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода тележки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в тележку.

					АУКС.942819.025 ПС	Лист
						7
м.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		
Ф2.106-5а					Копировал	Формат А4