

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
А.И. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

И.К. Лакин

И.К. Лакин

« 21 »

1998 г.



КОМПЛЕКТ МАССАЖНЫЙ

МК-6

ПАСПОРТ

АУКС.941126.006 ПС

1998г

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	взаим. инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Технические характеристики.....	4
5. Сборка и подготовка к работе	5
6. Условия эксплуатации.....	5
7. Техническое обслуживание.....	6
8. Транспортирование и хранение.....	6
9. Свидетельство о приемке.....	7
10. Свидетельство об упаковке.....	7
11. Гарантии изготовителя.....	8
12. Сведения о рекламациях	9

				АУКС.941126.006 ПС					
Лист	№ документа	Подпись	Дата	КОМПЛЕКТ МАССАЖНЫЙ МК-6		Лит.	Лист	Листов	
Разработал	НИКИТИНА	<i>[Подпись]</i>	20.08.98					2	9
Проверил	ЗУЕНКОВ	<i>[Подпись]</i>	20.08.98						
Нач. отдела									
Н. контроль									
Утвердил	ЛАКИН	<i>[Подпись]</i>	25.08.98	Паспорт					

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние комплекта массажного МК-6 зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 В комплект массажный МК-6 (Рис.1) входят массажная кушетка, цилиндрический валик и два подлокотника. Кушетка массажная снабжена поворотными механизмами, позволяющими менять ее конфигурацию путем наклона плоских частей отдела подголовника, отдела лежака и отдела подножника.
- 2.2 Высота кушетки регулируется гидравлическим подъемником с помощью ножных педалей.
- 2.3 Комплект массажный МК-6 предназначен для проведения лечебного гигиенического массажа, мануальной терапии и других физиотерапевтических манипуляций.
- 2.4 Комплект массажный МК-6 может быть использован для массажных кабинетов, оснащения клиник, больниц и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.

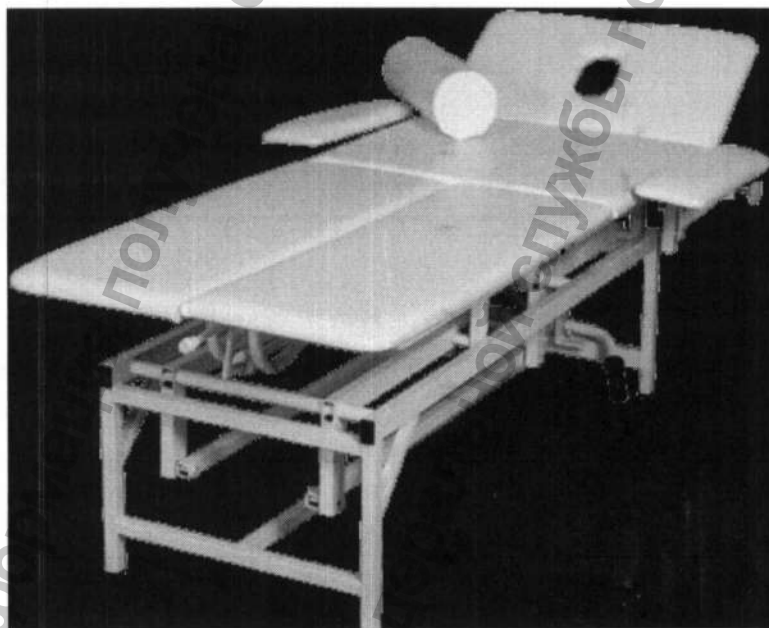


Рис.1

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в комплект массажный МК-6 приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол-во шт.
1. Кушетка массажная	АУКС.942819.020	1
2. Цилиндрический валик	АУКС.943221.007	1
3. Подлокотник	АУКС.943221.006	2
4. Паспорт	АУКС.941126.006 ПС	1

Представитель ОТК _____

Подпись, дата

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры должны быть не более, мм:
кушетки - длина – 2010, ширина – 700, высота – 640...1000;
цилиндрического валика - длина – 500, Ø - 150;
подлокотник – длина – 500, ширина – 150.
- 4.2 Масса должна быть не более, кг:
кушетки массажной – 65,0;
цилиндрического валика - 3,0;
подлокотника – 1,2.
- 4.3 Допустимая равномерная нагрузка на массажную кушетку – 180 кг:
- 4.4 Максимальный угол наклона подголовника массажной кушетки относительно горизонтального положения $\pm 35^\circ$.
- 4.5 Максимальный угол наклона секций подножника массажной кушетки 20° относительно горизонтального положения.
- 4.6 Максимальный угол наклона между отделом лежака и отделом подножника массажной кушетки 140° .

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1 Сборка и подготовка к работе кушетки массажной МК-6 производится следующим образом (Рис 1).
- 5.1.1 На переднюю стойку кушетки с двух сторон крепятся двумя гайками-барашками боковые кронштейны.
Штыри подлокотников вставляются в отверстия боковых кронштейнов и закрепляются винтовыми зажимами в любом удобном положении.
- 5.1.2 Изменение угла наклона подголовника осуществляется при помощи поворотного механизма.
- 5.1.3 Изменение углов наклона секций подножника осуществляется при помощи поворотных механизмов.
- 5.1.4 Изменение конфигурации массажной кушетки от единой горизонтальной плоскости до угла 140° между лежаком и подножником производится вращением против часовой стрелки ручки поворотного механизма.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация массажной кушетки должна производиться в закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений изделий.

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание производится с целью обеспечения долгосрочной работы комплекта массажного.
- 7.2 Регулярно производите осмотр изделий, входящих в комплект массажный.
- 7.3 Не допускайте механических повреждений, царапин, порезов.
- 7.4 Возникающие в процессе эксплуатации загрязнения регулярно удаляйте с поверхности изделий мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Комплект массажный допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 8.3 Хранение комплекта массажного должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отопляемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект массажный МК-6 зав. № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

подпись представителя ОТК

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Комплект массажный МК-6 зав. № _____

упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

М.П. _____

Упаковку произвел _____

Подпись

Комплект массажный МК-6 после упаковки

принял _____

Подпись

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта массажного требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода комплекта массажного в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 11.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в массажный комплект вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 12.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав комплекта массажного, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».
- АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание массажного комплекта.
- 12.2 Гарантийное обслуживание массажного комплекта производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:
111250, г. Москва, Красноказарменная ул, д. 14а., стр. 45
Тел./факс: (495) 361-55-37, тел. (495) 361-55-68.
- 12.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.941126.006 ПС	Лист
						9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		