


Копия верна
Генеральный директор

ООО «Диакомс»
И.Л. Сигалов

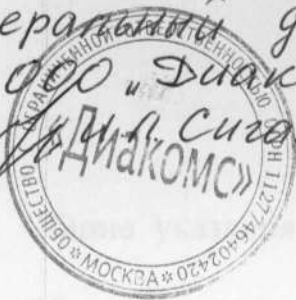

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Фирма Диакомс»

И.Л. Сигалов

« 24 » 2010 г.



Кресло гинекологическое
КГ-04 – «Диакомс»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.062 ПС

2010 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	взаим. инв. №	Подп. и дата

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	4
5. Условия эксплуатации.....	4
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Транспортирование и хранение.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7

				АУКС.942819.061 ПС			
Лист	№ документа	Подпись	Дата	Кресло гинекологическое КГ-04 – «Диаконс»	Лит.	Лист	Листов
Разработал	Никитина		24.04.2019				
Проверил	Зуенков		24.04.2019			2	8
Нач. отдела							
Утвердил	Зуенков		24.04.2019				
				Паспорт			

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние кресла гинекологического КГ-04 - «Диакомс» (в дальнейшем кресло) зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незавершенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Кресло предназначено для проведения гинекологических процедур. В случае необходимости кресло может быть использовано как процедурный стол.
- 2.2 Кресло может, применяется в женских консультациях и выездных смотровых кабинетах.
- 2.3 Кресло может складываться и помещаться в чехол.
- 2.4 Кресло состоит из верхней рамы, на которую установлены две секции: сидение и спинная. Обе секции имеют мягкий верх. Угол наклона сидения регулируется двумя растоматоми. Спинка кресла имеет три положения угла наклона. Верхняя рама установлена на две ножные рамы. На передней ножной раме установлена складная ступенька. Под сидением располагается, выдвижной лоток из нержавеющей стали. В кресло устанавливаются два ногодержателя, которые имеют съемный мягкий верх, и могут регулироваться по высоте.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в кресло приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ТУ9452-062-17099103-2010	Кресло гинекологическое КГ-04 - «ДИАКОМС»	1
АУКС.942819.062	Кресло	1
АУКС.943221.009	Ногодержатель	2
АУКС.943221.010	Лоток	1
АУКС.943221.012	Зажим	2
АУКС.944000.012	Чехол	1
АУКС.942819.062 ПС	Паспорт	1

					АУКС.942819.062 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры кресла в мм: длина – 1230, ширина – 750, высота – 1500, высота в положении стол – 900.
- 4.2 Масса изделия – 30 кг.
- 4.3 Допустимая равномерная нагрузка – до 120 кг.
- 4.4 Угол наклона спинной секции: 0°, 20°, 45°, 70°.
- 4.5 Угол наклона сидения от 0° до 30°.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Угол наклона сидения изменяется вручную, при помощи двух растоматов. Для осуществления изменения угла наклона сидения необходимо рукой повернуть сидение на нужный угол и отпустить руку. Для возвращения сидения в исходное положение необходимо рукой повернуть сидение на максимальный угол и отпустить его.
- 5.2 Для изменения угла наклона спинки необходимо переставить упор в гребенке.
- 5.3 Для регулировки высоты ногодержателей необходимо отвернуть фиксатор и установить ногодержатель на необходимую высоту и зафиксировать в этом положении.


					АУКС.942819.062 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Кресло должен подвергаться регулярному внешнему осмотру.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности, устранение неисправности должно проводиться представителями специализированной организации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Кресло допускается транспортировать в эксплуатационном положении всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.3 Хранение кресла должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

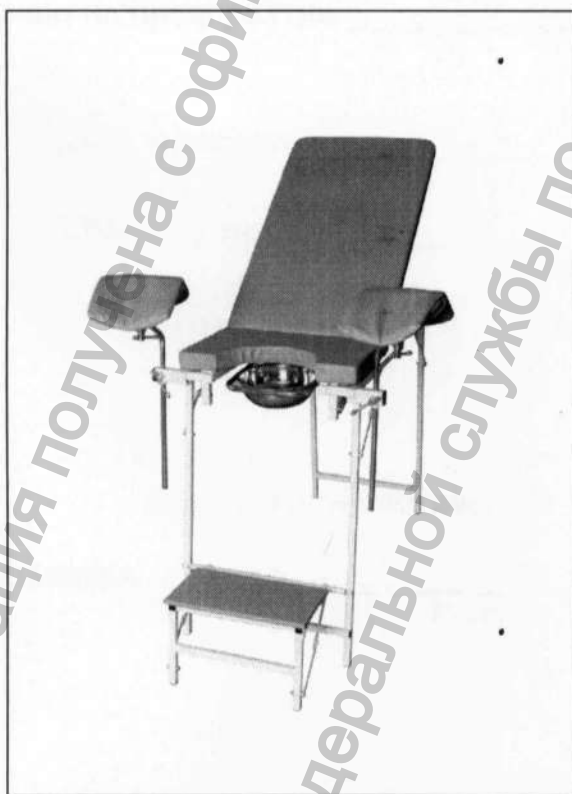

					АУКС.942819.062 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло гинекологическое КГ-04 – «Диакомс»
зав. № _____,
признано годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло гинекологическое КГ-04 – «Диакомс»
зав. № _____,
упаковано на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П. _____

Кресло гинекологическое КГ-04 – «Диакомс»
после упаковки принял _____
Подпись

					АУКС.942819.062 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода кресла в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в кресло.

					АУКС.942819.062 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		