

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Линейки скамькопические ЛС-02 (и дальнейшие линейки) предназначены для объективного исследования глаза с помощью скамькоп методом теневой пробы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон задней вершинной рефракции воспроизводимый линейками ± 19 дптр.
Градация воспроизведения задней вершинной рефракции, в диапазоне от 0 до $\pm 9,5$ дптр через 0,5 дптр, свыше $\pm 10,0$ дптр - 1,0 дптр.
Габаритные размеры линеек 400х40х15 мм.
Масса линеек не более 180г, комплекта в жестком футляре, не более 900г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Линейка с положительными линзами _____
Линейка с отрицательными линзами _____
Футляр, шт _____
Паспорт, экз _____

УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Линейки представляют собой прямоугольную рамку с ручкой по наружному контуру, в которой перемещается джигок. В отверстия рамки установлены линзы с утолщениями от $\pm 1,0$ до $\pm 9,0$ дптр, одно отверстие сквозное без линзы. В отверстия джигка установлены линзы с рефракциями $\pm 0,5$ и $\pm 10,0$ дптр.

Джигок может перемещаться по внешнему краю рамки с фиксацией против каждой линзы. Это позволяет воспроизводить промежуточные (за счет линз джигка $\pm 0,5$ дптр) и дополнительные (за счет линз $\pm 10,0$ дптр) значения рефракции.

На каждой линейке нанесены знаки «+» или «-» и цифры, обозначающие величину задней вершинной рефракции линз. Обозначения положительных линз выполнены белым цветом, отрицательных - красным.

Промежуточные и дополнительные значения рефракций вычисляются путем сложения значения наблюдаемого в окошке джигка со значением рефракции соответствующей линзы джигка.

Перемещение джигка в процессе эксплуатации должно выполняться без приложения чрезмерных усилий.

В процессе исследования линейка должна размещаться на расстоянии приблизительно 12 мм от вершины роговицы глаза.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА

Линейки хранятся в закрытом футляре в ящике рабочего стола врача офтальмолога или оптометриста.

Линейки следует хранить в помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Оптические поверхности, наружные поверхности линеек следует протирать мягкой салфеткой или ватой, слегка смоченной спиртом ректификатом или этанолом.

После обследования пациента рукоятка линейки должна быть продезинфицирована 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% хлороксов. Средства типа «Дигикс» (Один раз в неделю линейки должны быть продезинфицированы таким способом полностью).

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Линейки скамькопические ЛС-02 соответствуют ТУ 9442-006-11343187-2012 и предназначены только для эксплуатации.

Дата выпуска _____



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие линеек требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации линеек - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 6 месяцев для действующих учреждений, 9 месяцев для строящихся учреждений и 12 месяцев для учреждений с сезонным характером работы со дня поступления осветителя в учреждение.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель бесплатно заменит дефектные линейки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, и отсутствии механических повреждений.

По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель претензий по качеству линеек не принимает.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ 121422 Москва, ул. Гинияшевская д.1
Тел. (495) 744-56-51, 611-34-55