

ОКП 94 5210

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "Производственное
Предприятие Ока-Медик"



А. А. Пестелев

05 2011 г.

Кушетки медицинские

КМ-«Ока-Медик»

Паспорт

2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Комплектность	5
4. Устройство и принцип работы	5
5. Указание мер безопасности	6
6. Подготовка к работе	6
7. Техническое обслуживание	6
8. Правило транспортирование и хранение	6
9. Гарантии изготовителя	6
10. Приложение 1 Свидетельство о консервации	7
11. Приложение 2 Свидетельство об упаковывании	8
12. Приложение 3 Свидетельство о приемке	9
13. Гарантийный талон	10
14. Лист регистрации изменений	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кушетки медицинские КМ-«Ока-Медик» (далее - кушетки) предназначенные для размещения пациентов в смотровых, массажных и процедурных кабинетах.

Область применения – отделения лечебно-профилактических учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кушетки выпускаются в следующих исполнениях:

Таблица 1

№	Наименование	Обозначение модели	Назначение
1.	Кушетки медицинские смотровая КМс-«Ока-Медик»	КМс-1-«Ока-Медик» КМс-2-«Ока-Медик»	для размещения больных в смотровых и процедурных кабинетах с подголовником и без подголовника.
2.	Кушетки медицинские массажные КМм-«Ока-Медик»	КМм-1-«Ока-Медик»	для размещения больных в смотровых и массажных кабинетах
3.	Кушетки медицинские косметолога КМк-«Ока-Медик»	КМк-1-«Ока-Медик»	Для размещения людей в кабинете косметолога
4.	Кушетки медицинские физиотерапевтические КМф-«Ока-Медик»	КМф-1-«Ока-Медик»	для размещения больных в смотровых и процедурных кабинетах и проведения физиотерапии.
5.	Кушетки медицинские массажные с гидро- и электроприводом КМм-«Ока-Медик»	КМм-2-«Ока-Медик» КМм-3-«Ока-Медик»	для размещения больных в массажных, смотровых и процедурных кабинетах

Габаритные размеры, масса и конструктивные особенности кушеток соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

№№ п/п	Наименование модели	Обозначение модели	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Вес, не более, кг	Примечание
1.	Кушетки медицинские смотровые КМс-«Ока- Медик»	КМс-1-«Ока- Медик»	1900х600х550	50	Регулируемый наклон подголовника.
		КМс-2-«Ока- Медик»	1900х600х550	50	Без подголовника.

Продолжение таблицы 2

№№ п/п	Наименование	Обозначени е модели	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Вес, не более, кг	Примечание
2.	Кушетки медицинские массажные КМм-«Ока- Медик»	КМм-1-«Ока- Медик»	1900х700х760	60	Регулируется наклон подголовника. В центре подголовника отверстие для лица (возможно изготовление без отверстия по просьбе заказчика). Наличие вспомогательно го оборудования: - ступенька
3.	Кушетки медицинские косметолога КМк-«Ока-Медик»	КМк-1- «Ока- Медик»	1900х600х760	60	Регулируется наклон подголовника и ножной панели. Наличие вспомогательно го оборудования: - ступенька.
4.	Кушетки медицинские физиотерапев- тические КМф-«Ока- Медик»	КМф-1- «Ока- Медик»	1970х700х540	60	Каркас изготовлен из дерева или ДСП.
5.	Кушетки медицинские массажные с гидро- и электроприводом КМ-«Ока-Медик»	КМм-2-«Ока- Медик»	2000х700х (670÷1010)	80	С гидроприводом (возможно применение в качестве смотровой)
		КМм-3-«Ока- Медик»	2000х700х (670÷1010)		С электро- приводом (возможно применение в качестве смотровой)

Кушетки выдерживают предельную допустимую рабочую нагрузку не менее 130 кг.

Сварные швы ровные, плотные, без наплывов, прожогов и не проваренных мест. Швы зачищены.

Кушетки стоят устойчиво на горизонтальной поверхности пола. Зазор между полом и одной из опор не превышает 2 мм.

Кушетки состоят не менее чем из двух секций (кроме КМс-2-«Ока-Медик»). Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 45 градусов (для КМк-1-«Ока-Медик» подголовник 0-450, боковая панель 0-(-600)).

Секции имеют поролоновую обивку обтянутую винилискожей. Обивка ровная, без морщин, складок, разрывов материала.

Соединения деталей в кушетках выдерживают нагрузку не менее 50 Н.

Смещение ложа относительно рамы не допускается.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки кушеток соответствует таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
1 Кушетка медицинская (одно исполнение, одна модель)	ТУ 9451-012-70373441-2011	1
Упаковка		
2 Комплект упаковки	ТУ 9451-012-70373441-2011	1
Эксплуатационная документация		
3 Паспорт	9451-012-70373441-2011 ПС	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Кушетки представляют собой сборно-разборную конструкцию.

Покупные изделия имеют сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие нормативным документам, распространяющихся на них.

Поверхность кушеток не имеют вмятин, царапин, трещин, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортирования в условиях отрицательных температур кушетки должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 2 ч.

Распакуйте. Проверьте комплектность.

Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кушетки имеют простую надежную конструкцию и не требуют ежедневного постоянного обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Кушетки транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие кушеток требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Комплектующие изделия гарантируются в соответствии со стандартами или техническими условиями на них.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Кушетки медицинские

КМ-«Ока-Медик»

наименование изделия

обозначение модели

номер технических условий ТУ 9452-012-70373441-2011

заводской номер

подвергнуты

наименование или шифр предприятия,

консервации согласно

производившего консервацию

требованиям, предусмотренным в

Дата консервации

Срок консервации

М.П

Консервацию произвел

(подпись)

Изделие после консервации принял

(подпись)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетки медицинские

КМ-«Ока-Медик»

наименование изделия

обозначение

заводской номер

упакована

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям ТУ 9452-012-70373441-2011 и комплекту
технической документации.

Дата упаковки

Упаковку произвел

(должность,

личная подпись,

расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетки медицинские
наименование изделия

КМ-«Ока-Медик»
обозначение

заводской номер _____

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями ТУ 9452-012-70373441-2011 и комплекту технической документации.

МП _____
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Завод-изготовитель

Адрес, реквизиты, телефон

Адрес, реквизиты, телефон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт(замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники

Кушетки медицинские
наименование изделия

КМ-«Ока-Медик»
обозначение

заводской номер

выпущенные

(по свидетельству о приемке)

приобретенные

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

введены в эксплуатацию

(дата, подпись)

приняты на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

(адрес ремонтного предприятия)

МП Подпись руководителя и

печать ремонтного предприятия

МП Подпись руководителя и

печать предприятия-владельца

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	ИЗМЕНЕННЫХ	ЗАМЕНЕННЫХ	НОВЫХ	ИЗЪЯТЫХ					

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



11.05.2018