

Прощито
3 листа



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Настоящий паспорт распространяется на стеллаж для биксов ССК-01Р (далее - стеллаж), предназначенный для размещения биксов в медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры:	
- длина, мм	1255
- глубина, мм	442
- высота, мм	1242
2 Масса, кг, не более	24,7
3 Конструктивные элементы:	
- полка – нержавейка, шт.	4
- колесо Ø75 поворотное, шт.	2
- колесо Ø75 с тормозом, шт.	2
4 Равномерно-распределенная нагрузка на полку, кг	15

2 Комплектность

№ поз.	Наименование	Кол. шт.
1	Боковина	2
2	Полка в сборе	4
3	Колесо Ø75 поворотное	2
4	Колесо Ø75 с тормозом	2
5	Болт М8х55 ГОСТ 7798-70	16
6	Болт М10х30 ГОСТ 7798-70	4
7	Гайка М8-6гГОСТ 5915-70	16
8	Шайба 8.65Г ГОСТ6402-70	16
9	Шайба 8,4 А ГОСТ 11371-78	32
-	Эксплуатационный документ - паспорт	1

3 Подготовка к работе

Стеллаж поставляется в разобранном и упакованном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте комплектность.


4 Сборка изделия

Сборку стеллажа производить вдвоем. Одну из боковин поз.1 поставить боковой гранью на ровную горизонтальную поверхность. Закрепить на ней с помощью крепежных элементов поз.5,7,8,9 полки поз.2, согласно схеме сборки. К установленным полкам аналогичным способом прикрепить вторую боковину поз.1. К гайкам, находящимся в нижней части боковин к помощью болтов поз.6 закрепить колеса поз.3 и 4. Для сборки использовать гаечные ключи на "13" и на "17" (для установки колес).

Снять защитную пленку с полок.

Выполнить дезинфекцию всех наружных поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

Схема сборки стеллажа ССК-01Р

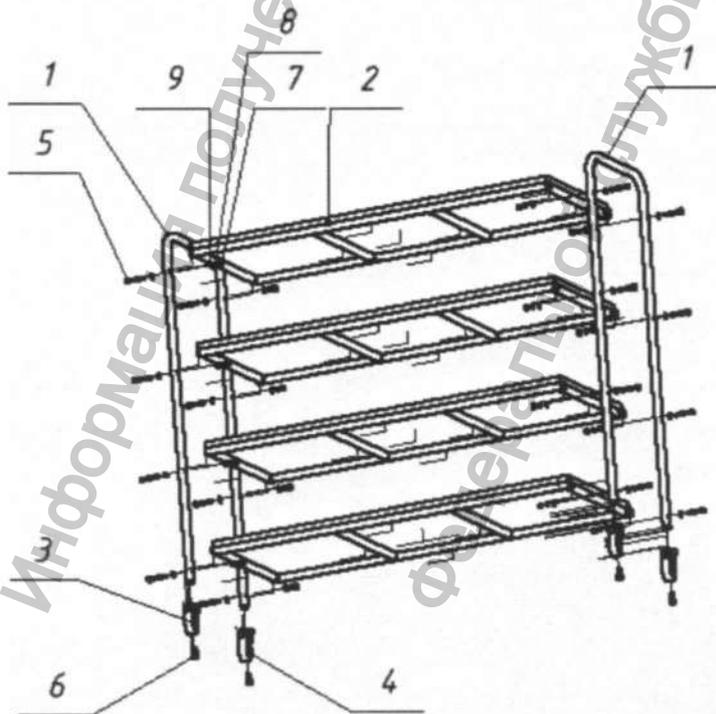

5 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление стола невозможно или экономически нецелесообразно.

Стол в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня их отправки потребителю.

6 Свидетельство о приемке

Стеллаж для биксов ССК-01Р

_____ зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации

Начальник ОТК _____

подпись

_____ расшифровка

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Стеллаж для биксов
ССК-01Р

Паспорт

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ОПТИМЕХ»

(Н.Е. ЛЕШУКОВ)

