

ОКП 943790
ТУ 9437-007-52777873-2010

ООО «МЕДПЛАНТ»


107258, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11
Тел./факс : +7 (495) 223-60-16 (многоканальный)
www.medplant.ru ; E-mail: medplant@medplant.ru

**НАБОР ИЗДЕЛИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
НИП-01-«Медплант»**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.940240.РЭ

*Перед началом работы с набором
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

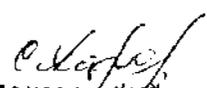
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И. И. С. М.

Назначение: набор изделий педиатрический реанимационный для оказания скорой и неотложной помощи детям НИП-01 «Медплант» (в сумке универсальной СМУ-02, в упаковке врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм), предназначен для оказания скорой и неотложной помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста, проведения реанимации и интенсивной терапии на догоспитальном этапе.

Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильные спасательные формирования, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

Набор выпускается: в сумке универсальной СМУ-02, в упаковке врача скорой помощи серии УМСП-01-Пм (440x252x330).

Основные технические характеристики набора:

	В сумке СМУ-02	В упаковке УМСП-01-Пм
Габаритные размеры, мм	510x300x300	440x252x330
Предельная масса набора с вложениями, не более	5,5 кг	6,5 кг

Комплект поставки:

1. Набор вложений
2. Сумка универсальная СМУ-02 или упаковка серии УМСП-01-Пм
3. Ампульница **
4. Руководство по эксплуатации

** - Входит в состав набора в случае его комплектации в сумке СМУ-02

Описание изделия:

набор изделий педиатрический реанимационный для оказания скорой и неотложной помощи детям НИП-01 «Медплант» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному персоналу оказывать скорую и неотложную помощь на догоспитальном этапе детям дошкольного и младшего школьного возраста. Набор упакован в сумку медицинскую универсальную СМУ-02 или упаковку врача скорой помощи серии УМСП-01-Пм.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02 имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолона ПЛЭ. Дно сумки выполнено из непромокаемого тентового материала.

Основные преимущества конструкции – удобство и быстрота доступа к вложениям, благодаря объёмным карманам по бокам сумки и мобильному вкладышу с ячейками расположенному внутри сумки.

В комплект сумки входит ампульница, выполненная из водоотталкивающей ПВХ ткани. Места под ампулы разделены защитной перегородкой во избежание повреждения ампул при переноске.

Сумка оборудована плечевым ремнем, а дополнительная пряжка на нем и накладка предохраняют ремень от сминания.

Корпус упаковки врача скорой помощи серии УМСП-01-Пм изготовлен из термостойкого ударопрочного пищевого АБС пластика, ложемент для ампул и флаконов выполнен из изолона ПЛЭ, который применяется в медицинской промышленности. Наборы в упаковках поставляются с ремонтным комплектом.

Упаковка УМСП-01-Пм (440x252x330) имеет ложемент для флаконов антисептиков и перегородки в лотках. На дне упаковки имеется перегородка, с помощью которой можно трансформировать внутреннее пространство футляра по своему усмотрению.

Правила эксплуатации :

- 1) Перед началом работы с набором внимательно прочтите эксплуатационную документацию на медицинские приборы, входящие в состав набора (ларингоскоп, дыхательный мешок, аспиратор*, пульсоксиметр*).
- 2) Изделия и инструменты (линки ларингоскопа, маски) должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.
- 3) Сумка набора и укладка серии УМСП-01-Пм имеют жесткий каркас и защищают элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов набора и нарушению стерильности вложений. Бережное отношение и аккуратная работа продлевает срок службы набора.
- 4) После окончания работы с пациентом загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты. Своевременно пополняйте состав расходных материалов, помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.
- 5) При необходимости дезинфекция сумки и укладки серии УМСП-01-Пм производится 2-х кратным протиранием салфеткой, смоченной в 3 %-ном растворе хлораммина, с интервалом 15 мин. и выдержкой после этого 60 мин. (по МУ287-113). **Обработка сумки спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается!!!**

*исключаются в состав набора по желанию заказчика

Замена тяги с использованием ремонтного комплекта:


(для упаковок серии УМСП-01-Пм)

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

обозначения на рисунке:

- 1 - винт;
- 2 – корпус укладки, внутренняя сторона
- 3 - тяга
- 4 - втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 – гайка

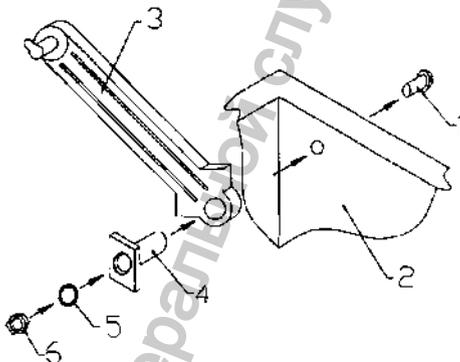

Гарантия изготовителя: Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на вложения (расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций).

ОЛГА ВЕРНА

подпись *Olga Verina*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ХАБАРОВСКИЙ