

Столики процедурные «СП-01» Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на столики процедурные «СП-01», предназначенные для размещения лекарств, инструментов и прочих изделий медицинского назначения.

1 Основные технические данные

Обозначение изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более	Полки стеклян. шт.	Полки метал. шт.	Полки нержав. шт.
	длина	ширина	высота				
СП-01	700	420	800	11,5	-	4	-
СП-01С	665	385	800	19,1	4	-	-
СП-01Н	665	385	800	14,1	-	-	4
СП-01-2С	665	385	800	10,5	2	-	-
СП-01-2Н	665	385	800	8,0	-	-	2
СП-01-3	700	420	800	9,5	-	3	-
СП-01-3С	665	385	800	14,5	3	-	-
СП-01-3Н	665	385	800	12,9	-	-	3
СП-01-4	665	385	800	8,6	-	2	-
СП-01-4Н	665	385	800	8,6	-	-	2
СП-01-2К	810	400	780	10,0	-	-	2 лотка

2 Комплектность

Столик – 1шт.

Паспорт – 1шт.

3 Подготовка к работе

Столик поставляется в собранном и упакованном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки.

Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения колес.

Снимите защитную пленку с полок из нержавеющей стали.

Выполните дезинфекцию всех поверхностей столика химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год оси колес смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

5 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление столика невозможно или экономически нецелесообразно.

Столик в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отправки потребителю.

6 Свидетельство о приемке

Столик СП-01 _____

тип

_____ зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, 51,
ОАО «Оптимех»
т/ф 8 (8172) 28-38-69

Начальник ОТК _____

М П _____

« _____ » _____

КОПИЯ ВЕРНА

_____ подпись

_____ расписываю

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ОПТИМЕХ»

20 _____ г.

(Н.Е. ЛЕШУКОВ)



Столики процедурные «СП-01» Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на столики процедурные «СП-01», предназначенные для размещения лекарств, инструментов и прочих изделий медицинского назначения.

1 Основные технические данные

Обозначение изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более	Полки стеклян. шт.	Полки метал. шт.	Полки нержав. шт.
	длина	ширина	высота				
СП-01	700	420	800	11,5	-	4	-
СП-01С	665	385	800	19,1	4	-	-
СП-01Н	665	385	800	14,1	-	-	4
СП-01-2С	665	385	800	10,5	2	-	-
СП-01-2Н	665	385	800	8,0	-	-	2
СП-01-3	700	420	800	9,5	-	3	-
СП-01-3С	665	385	800	14,5	3	-	-
СП-01-3Н	665	385	800	12,9	-	-	3
СП-01-4	665	385	800	8,6	-	2	-
СП-01-4Н	665	385	800	8,6	-	-	2
СП-01-2К	810	400	780	10,0	-	-	2 лотка

2 Комплектность

Столик – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

3 Подготовка к работе

Столик поставляется в собранном и упакованном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки.

Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения колес.

Снимите защитную пленку с полок из нержавеющей стали.

Выполните дезинфекцию всех поверхностей столика химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

