

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»

Сергей Сигапов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Фирма Диакомс»

В.А. Аникин
В.А. Аникин

2004 г.



КУШЕТКА МАССАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ
ПОДГОЛОВНИКОМ В КОМПЛЕКТЕ
СО СТУЛОМ КМ – «Диакомс».

ПАСПОРТ

АУКС.942819.055 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Вз. м. инв. №	Подп. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Технические характеристики.....	4
5. Порядок работы	5
6. Условия эксплуатации.....	5
7. Техническое обслуживание.....	5
8. Транспортирование и хранение.....	5
9. Свидетельство о приемке.....	6
10. Свидетельство об упаковке.....	6
11. Гарантии изготовителя	7

				АУКС.942819.055 ПС					
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Кушетка массажная с регулируемым подголовником в комплекте со стулом КМ – «Диакоме» Паспорт	Лит.	Лист	Листов	
	Разработал	НИКИТИНА		3.01.04					
	Проверил	ЗУЕНКОВ		3.01.04				2	8
	Нач. отдела								
	Н. контроль								
	Утвердил	АНИКИН		30.04.04					

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние кушетки массажной с регулируемым подголовником в комплекте со стулом КМ – «Диакомс» зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Кушетка массажная КМ – «Диакомс», предназначена для проведения лечебного гигиенического массажа, мануальной терапии и других физиотерапевтических манипуляций.

В КМ – «Диакомс» входит массажная кушетка (рис.1), табурет поворотный и цилиндрический валик.

Массажная кушетка имеет подголовник с бесступенчатой регулировкой угла наклона и два подлокотника, которые регулируются по высоте.

Кушетка может быть использована для оснащения клиник, больниц, массажных кабинетов и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.

Кушетка изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150.

По устойчивости к механическим воздействиям кушетка относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.



Рис.1

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АУКС.942819.055 ПС	Лист
						3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки КМ – «Диаконс» соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1.

N П/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛ-ВО ШТ.
	Кушетка массажная КМ – «Диаконс»	ТУ9452-055-17099103-2004	
1.	Кушетка массажная	АУКС.942819.021	1
2.	Табурет поворотный	АУКС.942819.044	1
3.	Цилиндрический валик	АУКС.943221.007	1
4.	Подлокотник	АУКС.943225.001	2

Эксплуатационные документы

8.	Паспорт	АУКС.942819.055 ПС	1
----	---------	--------------------	---

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Масса не более, кг:
 кушетки массажной - 29,0;
 табурет поворотный – 8,0;
 цилиндрического валика - 3,0.

4.2 Габаритные размеры, мм, не более:
 кушетки массажной - длина - 1860, ширина - 620, высота 700;
 табурет поворотный – высота - 690...840; высота до сидения – 400...560; диаметр сидения – 350; диаметр основания – 600;
 цилиндрический валик - длина - 500, Ø - 150;

4.3. Технические характеристики массажной кушетки.

4.4 Кушетка должна выдерживать нагрузку весом 180 кг, при этом нагрузка должна быть равномерно распределена на все отделы массажной кушетки, установленные в горизонтальном положении.

					АУКС.942819.055 ПС	Лист 5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

- 4.4. Поворотный механизм, расположенный в отделе подголовника кушетки, должен обеспечивать изменение угла наклона подголовника на $\pm 40^\circ$ относительно горизонтального положения.
- 4.6. Высота регулировки подлокотников должна быть не менее 300 мм.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация комплекта должна производиться в закрытых помещениях.

6.2 В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений элементов кресла.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Кушетка должно подвергаться регулярному внешнему осмотру.
- 7.2 В случае обнаружения неисправностей, устранение их должно производиться представителем предприятия-изготовителя.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Кушетку допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 8.3 Хранение кушетки должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 2 по ГОСТ 15150.

										Лист
										6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АУКС.942819.055 ПС					

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка массажная КМ – «Диакомс» зав. № _____ признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кушетка массажная КМ – «Диакомс» зав. № _____ упаковано на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П.

					АУКС.942819.055 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		7

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода кушетки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 11.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия.

									Лист
									8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АУКС.942819.055 ПС				