



«Касимовский приборный завод» - филиал акционерного общества «Государственный Рязанский приборный завод»

АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный завод»  
Местонахождение филиала: 391300 Россия, Рязанская обл.  
г. Касимов, ул. Индустриальная, 3  
тел./ факс (49131) 2-41-31, 2-29-21, e-mail: fax@kaspz.ru

АО «ГРПЗ»  
Юридический адрес:  
390000 Россия, г. Рязань, ул. Семинарская, 32

30.06.2021

На № \_\_\_\_\_

№ 316/16467

от \_\_\_\_\_

### Субъектам обращения медицинских изделий

Уважаемые коллеги!

Для увеличения срока службы и предотвращения отказов изделий «Установка комплексная для утилизации медицинских отходов по ТУ 9451-034-41457390», в вариантах исполнения УМО-75 ПЗ и УМО-21 ПЗ, обращаю ваше внимание, на необходимость использования для работы парогенератора дистиллированной воды или воды соответствующей требованиям ГОСТ Р EN 13060-2011 Стерилизаторы паровые малые (приложение С) или ГОСТ 31598-2012 Стерилизаторы паровые большие (приложение А).

Так же, для УМО-21 ПЗ, в связи с большой продолжительностью цикла, рекомендую опустошать бачок сбора конденсата после каждого цикла обеззараживания.

С уважением,  
Главный инженер

(Доверенность от 14.12.2020 №211)



А.В. Рудаков