

Копия верна  
Генеральный директор  
ООО «Диакомс»  
И. П. Сидоров



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  
ООО «Фирма Диакомс»

  
В.А. Аникин

« 02 » 2004г.



Кресло гинекологическое стационарное с фиксированным по высоте сидением и регулируемой по наклону спинке КГс-02-«Диакомс», в комплекте со ступенькой и выдвижным тазиком.

Кресло гинекологическое передвижное с регулируемыми по высоте сидением и по наклону спинкой КГп-03-«Диакомс».

ПАСПОРТ

АУКС.941126.057 ПС

2004

Инд. № подл.	Подл. и дата	взв. инв. №	Подл. и дата

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.goszdravnadzor.ru

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Комплектность .....	4
4. Устройство и принцип работы .....	4
5. Указания мер безопасности .....	5
6. Свидетельство о приемке .....	6
7. Свидетельство об упаковке .....	6
8. Гарантии поставщика .....	7
9. Сведения о рекламациях .....	7

					АУКС.941126.057 ПС			
	<b>Лист</b>	<b>№ документа</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	Кресла гинекологические КГс-02 – «Диакомс» КГп-03 – «Диакомс»	<b>Лит.</b>	<b>Лист</b>	<b>Листов</b>
	Разработал	НИКИТИНА		02.02.04				
	Проверил	ЗУЕНКОВ		02.02.04			2	9
	Нач. отдела							
	Н. контроль							
	Утвердил	ЗУЕНКОВ		02.02.04	<b>Паспорт</b>			

## 1. Назначение изделия.

1.1. Кресла гинекологические КГс-02-«Диакомс» (рис.1) и КГп-03-«Диакомс» (рис.2) предназначены для проведения гинекологических процедур.

1.2. Кресла могут применяться в женских консультациях, в смотровых кабинетах, а также в роддомах.

1.3. Конструкция кресел сделана из стальных труб, покрытых полимерным покрытием. Мягкие элементы ложа выполнены из пено-полиуритана и покрыты искусственной кожей, устойчивой к чистке и дезинфекции. Изменение углов наклона опоры спины, а также положения Тренделенбург и антиТренделенбург регулируются благодаря газовым пружинам с блакировкой. Кресла оснащены лотком из нержавеющей стали, упорами для рук, ногодержателями, а кресло КГс-02-«Диакомс» имеет ступеньку.

1.4. Кресло КГп-03-«Диакомс» имеет функцию изменения высоты. Регулировка высоты кресла осуществляется гидроподъемником при помощи ножной педали.

1.5. Кресло КГп-03-«Диакомс» устанавливается на колесные опоры диаметром 125 мм и может комплектоваться боковыми ограждениями.

1.6. Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха  $22 \pm 2^\circ\text{C}$ , относительная влажность воздуха 80% при температуре  $+25^\circ\text{C}$  при более низких температурах без конденсации влаги.

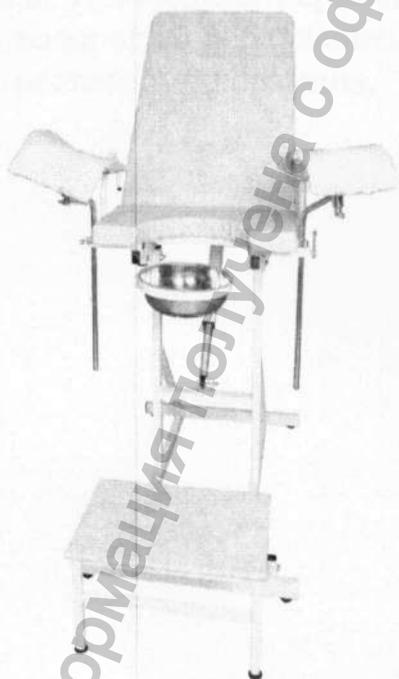


Рис.1



Рис.2

						Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АУКС.941126.057 ПС	

## 2. Технические характеристики.

### 2.1. Масса кресла:

КГс-02-«Диакос» – не более 50 кг;

КГп-03-«Диакос» – не более 70 кг.

### 2.2. Габаритные размеры кресла, мм:

- длина - 1300;

- ширина - 600;

- высота - 1700.

- высота в положении стола – 960.

Высота кресла КГп-03-«Диакос» – 1400...1700,

Высота кресла КГп-03-«Диакос» в положении стол – 600...900.

### 2.3. Габаритные размеры панели кресла, мм

- длина спинной секции - 850;

- длина тазобедренной секции - 320;

- ширина секций - 550;

- высота минимальная, не более - 650.

Ход панели кресла КГп-03-«Диакос» по высоте - не менее 300 мм.

### 2.5. Угол наклона панели от 0° до 45°.

### 2.6. Угол наклона спинной секции панели от горизонтали от 0° до 80°.

2.7. Кресло при горизонтальном положении спинной секции выдерживает на панели, установленной в нижнее положение, равномерно-распределенную двукратную номинальную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 80 кг.

2.8. Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос», «Астра» или 1% раствором хлорамина.

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

### 3. Комплектность

3.1. Комплект поставки кресел должен соответствовать указанному в таблице 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1

NN П.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛ- ВО шт.
	Кресло гинекологическое КГс-02-«Диакомс»	ТУ9452-057-17099103-2004	
1.	Кресло	АУКС.942819.057	1
2.	Ногодержатель	АУКС.943221.009	2
3.	Лоток	АУКС.943221.010	1
4.	Зажим	АУКС.943221.011	2

Эксплуатационная документация

5	Паспорт	АУКС.942819.057 ПС	1
---	---------	--------------------	---

ТАБЛИЦА 2

NN П.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛ- ВО шт.
	Кресло гинекологическое КГп-03-«Диакомс»	ТУ9452-057-17099103-2004	
1.	Кресло	АУКС.942819.057-01	1
2.	Ногодержатель	АУКС.943221.009	2
3.	Лоток	АУКС.943221.010	1
4.	Зажим	АУКС.943221.011	2

Эксплуатационная документация

5	Паспорт	АУКС.942819.057 ПС	1
---	---------	--------------------	---

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

#### 4. Устройство и принцип работы.

4.1. КГс-02-«Диакомс» и КГп-03-«Диакомс» состоят из кресел и навесных приспособлений.

4.2. Кресло КГс-02-«Диакомс» (Рис.1) состоит из панели и механизма её поворота, основания, откидной подножки, выдвижного лотка.

4.2.1. Панель состоит из рамы, на которую установлены две секции: сидение и спинная, которые соединены шарнирно. Обе секции имеют мягкий верх.

4.2.2. Угол наклона спинной секции и поворота панели осуществляется газовыми пружинами при нажатии управляющих ручек.

4.2.3. Панель кресла КГс-02-«Диакомс» шарнирно закреплена с основанием и может быть наклонена в положениях  $0^{\circ} \dots 80^{\circ}$ .

4.2.4. Панель кресла КГп-03-«Диакомс» шарнирно закреплена на механизме подъема-опускания и поворота панели и может быть наклонена в положениях  $0^{\circ} \dots 80^{\circ}$ .

4.2.5. Работа механизма подъема-опускания панели осуществляется гидроприводом путём нажатия на ножную педаль. На раме панели с двух сторон установлены два зажима, в которых фиксируются два ногодержателя, регулирующиеся по высоте, и две рукоятки и выдвижной лоток.

4.2.6. Основание кресла КГс-02-«Диакомс» представляет собой раму установленную на четырех регулируемых опорах, с прикрепленной поворотной подножкой.

4.2.7. Основание кресла КГп-03-«Диакомс» представляет собой раму установленную на четыре колесные опоры с тормозами.

#### 5. Указания мер безопасности.

5.1. Лица, не освоившие принцип действия кресла, порядка работы на нем и правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

К самостоятельной работе по эксплуатации и техническому обслуживанию кресла допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и допущенные администрацией учреждения.

5.2. Следите за надежным креплением навесных приспособлений

					АУКС.941126.045 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло гинекологическое КГс-02 - «Диакомс» (КГс-03 - «Диакомс»)  
зав. № \_\_\_\_\_

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись представителя ОТК

### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло гинекологическое КГс-02 - «Диакомс» (КГп-03 - «Диакомс»)  
зав. № \_\_\_\_\_

упакован на предприятии \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Кресло гинекологическое КГс-02 - «Диакомс» (КГп-03 - «Диакомс»)  
после упаковки принял \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

					АУКС.941126.045 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода кресла в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
  - при нарушении правил эксплуатации;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в кресло вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.941126.057 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав кресла, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание кресла.

11.2 Гарантийное обслуживание комплекта массажного производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:  
111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14а., стр.45  
Тел./факс: (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.941126.057 ПС	Лист 9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		